

GUIA VIRTUAL

UNIDADE ACADÊMICA

Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia

ORGANIZADORES

Ana Clarisse de Freitas Maia
Eliandra Vitória Gurgel da Silva
Elenimar Costa Bezerra
Eliziana Caetano de Freitas
Hugo Marcus Aguiar de Melo Rodrigues

Janaíne Maria de Oliveira
Laureana Fernandes de Medeiros
Rafaela de Lima Fernandes
Renata Janice Morais Lima Ferreira
Sibele Lima da Costa Dantas
Uévila Fonsêca Corcino

Capa e diagramação: Uévila Fonsêca Corcino





Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Reitora

Cicília Raquel Maia Leite

Vice-Reitor

Francisco Dantas de Medeiros Neto

Diretor da Editora Universitária da Uern (Eduern)

Francisco Fabiano de Freitas Mendes

Chefe do Setor Executivo da Editora Universitária da Uern (Eduern)

Jacimária Fonseca de Medeiros

Chefe do Setor de Editoração da Editora Universitária da Uern (Eduern)

Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins



Conselho Editorial da Edições Uern

Edmar Peixoto de Lima

Filipe da Silva Peixoto

Francisco Fabiano de Freitas Mendes

Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima

Jacimária Fonseca de Medeiros

José Elesbão de Almeida

Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins

Maria José Costa Fernandes

Maura Vanessa Silva Sobreira

Kalidia Felipe de Lima Costa

Regina Célia Pereira Marques

Rosa Maria Rodrigues Lopes

Saulo Gomes Batista

**Catálogo da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.**

Maia, Ana Clarisse de Freitas et al
Guia Virtual da Unidade Acadêmica do Hospital Regional da Mulher
Parteira Maria Correia. / Ana Clarisse de Freitas Maia et al. - Mossoró, RN:
2025.

192 p. : ebook
ISBN 978-85-7621-597-4

1. Guia técnico hospitalar. 2. Boas Práticas de Convivência – Hospital
Regional da Mulher Parteira Maria Correia. I. Silva, Eliandra Vitória Gurgel da.
II. Bezerra, Elenimar Costa. III. Freitas, Eliziana Caetano de. IV. Rodrigues,
Hugo Marcus Aguiar de Melo. V. Oliveira, Janaína Maria de. VI. Medeiros,
Laureana Fernandes de. VII. Fernandes, Rafaela de Lima. VIII. Ferreira,
Renata Janice Moraes Lima. IX. Dantas, Sibebe Lima da Costa. X. Corcino,
Uévila Fonsêca. XI. Título. XII. Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.

UERN/BC

CDD 610.202

ÍNDICE

1. Boas- Vindas	5
2. Boas Práticas de Convivência	9
3. Espaços do centro de Estudos e auditório Maria Gomes de Oliveira	19
3.1 Secretaria	21
3.2 Auditório	25
3.3 Sala de Treinamento - Laboratório de Mobilidade	29
3.3.1 Simuladores	31
3.3.2 Ítens	44
3.4 Sala de Treinamento 1	56
3.4.1 Ítens	60
3.4.2 Simuladores	73
3.5 Sala de Treinamento 2	91
3.5.1 Simuladores	95

ÍNDICE

3.6. Sala de Simulação 3	116
3.6.1 Simuladores	120
3.6.2 Principais atividades possíveis	128
3.6.3 Equipamentos	148
3.7 Sala de Reuniões 1	164
3.8 Sala de Reuniões 2	166
3.9 Biblioteca	168
3.10. Laboratório de Moldes	171
3.10.1 Ítens	173
3.11 Banheiros	175
3.12 Copa	179
3.13 Gerência	182
4. Encerramento	189
5. Agendamento de salas do centro de estudos	190

BOAS-VINDAS

Sejam bem-vindos ao Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira, um espaço projetado para eventos, reuniões e atividades acadêmicas dentro do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia (HRMPMC).

Este setor oferece um ambiente confortável e estruturado para garantir o bom andamento das atividades, promovendo conhecimento e troca de experiências na área da saúde.



BOAS-VINDAS



**Tem dúvida de como chegar ao
Centro de Estudos e Auditório Maria
Gomes de Oliveira?**

BOAS-VINDAS

Veja esse vídeo e entenda como chegar ao Centro de estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira:




Qr code para acessar o vídeo ao lado



BOAS-VINDAS

Agora que você já encontrou o nosso setor, que tal conhecer um pouco sobre as nossas boas práticas de convivência?

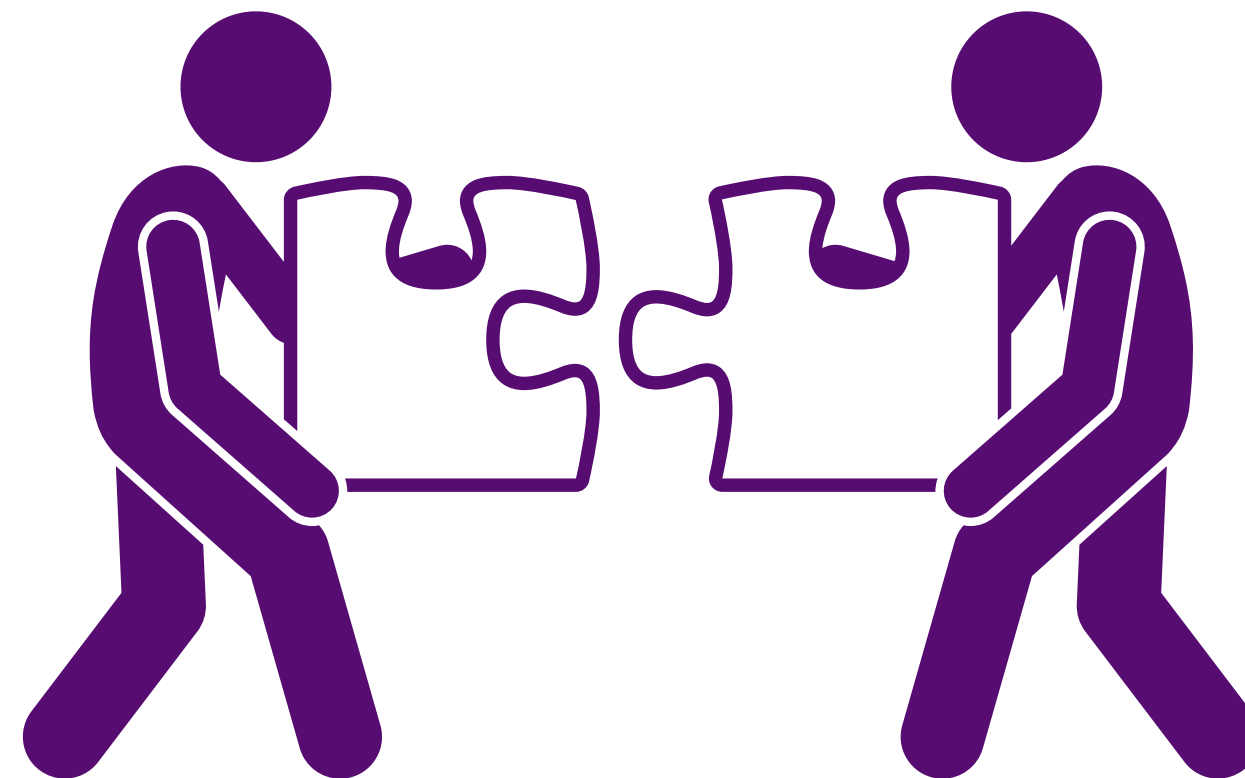

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

Para manter a organização e o bem-estar de todos, pedimos a gentileza de seguir as seguintes regras:

- Respeite o ambiente e os demais usuários, mantenha o silêncio durante as atividades.
- Evite o uso de celulares no modo sonoro.
- Não é permitido fumar em nenhuma área do setor.
- Não mova os móveis do lugar, sem ser solicitado por um responsável.



BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas no setor, salvo em eventos específicos, com autorização prévia. Em todos os outros casos, dirija-se ao refeitório ou copa do Hospital, que estão localizados no subsolo, no mesmo andar do Auditório e Centro de Estudos Maria Gomes de Oliveira.




- O sistema de refrigeração do nosso setor é bem eficiente, então é sempre bom ter um casaco para se manter aquecido. A garrafa de água também é um item indispensável.

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Não manipule os Simuladores, ou qualquer outro equipamento, sem autorização e orientação prévia.
- Ao manusear os Simuladores, **sempre usar luvas.**



BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

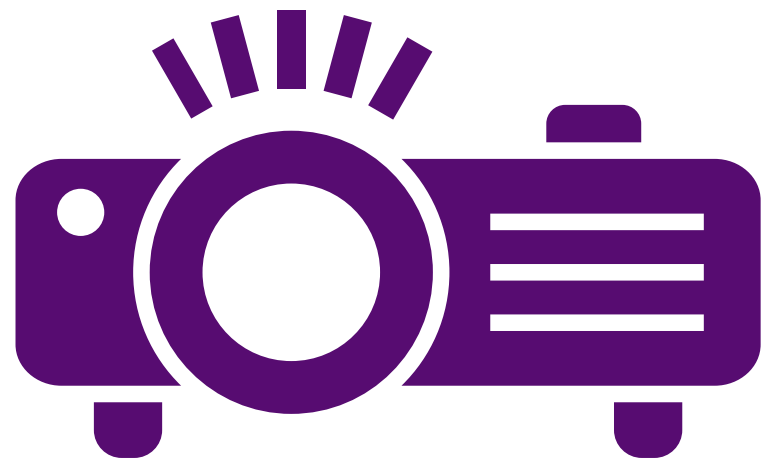


- Mantenha o ambiente limpo e descarte corretamente qualquer resíduo nos locais apropriados.

- Utilize os equipamentos multimídia com responsabilidade e apenas quando autorizado. Caso tenha dúvidas, procure algum servidor responsável pelo setor.



BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Não danifique ou remova etiquetas de identificação dos móveis e equipamentos do setor. A identificação é fundamental para o controle e manutenção do patrimônio, garantindo que todos os itens permaneçam disponíveis para uso adequado.

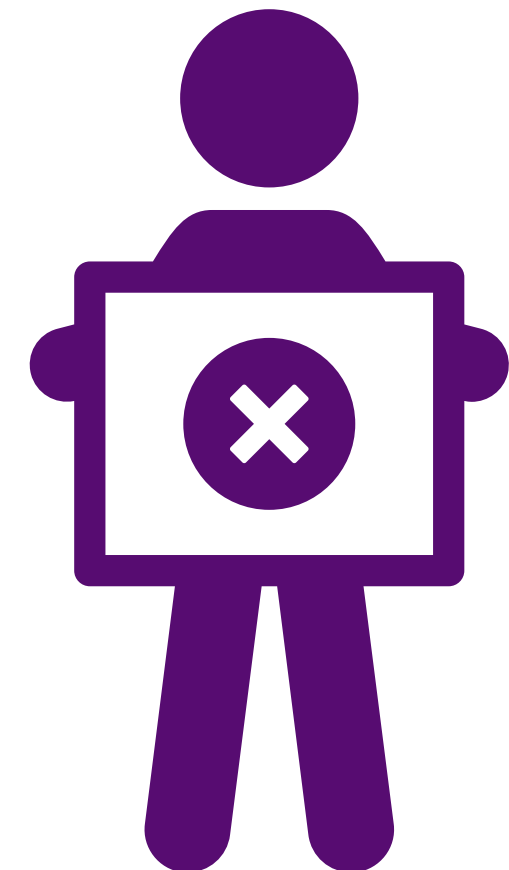

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA


- Para sua segurança e controle do espaço, utilize sempre seu crachá de identificação quando estiver no interior do Hospital.



- Após o uso, certifique-se de devolver todos os materiais ao local adequado, garantindo que estejam sempre disponíveis.

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- A entrada no setor deve ser feita com vestimentas adequadas ao ambiente hospitalar.

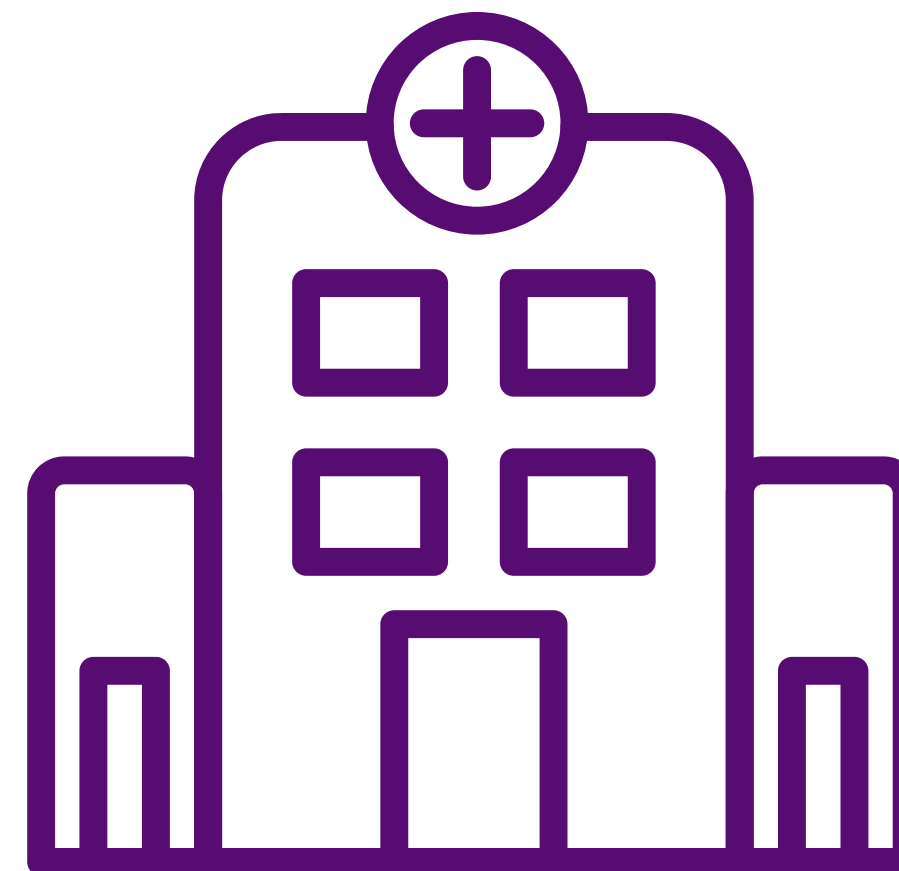

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Considerando a limitação de espaço disponível para armazenamento de pertences pessoais, solicitamos que traga apenas os itens estritamente necessários para o Hospital.



BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Para mais informações, acesse o **Manual de Boas Vindas do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia** no QR code abaixo:



Servidores



Alunos, residentes e preceptores



BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA

- Agradecemos sua colaboração para manter este espaço sempre organizado e acolhedor. O bom uso deste ambiente garante que todos possam aproveitá-lo da melhor forma possível.
- Seja gentil com os demais usuários, respeite as normas e contribua para um ambiente harmonioso e produtivo. Caso precise de alguma orientação ou suporte, nossa equipe está à disposição.
- **Aproveite seu tempo no Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira e tenha uma excelente experiência!**



ESPAÇOS DO CENTRO DE ESTUDOS E AUDITÓRIO MARIA GOMES DE OLIVEIRA

- Nosso Centro de Estudos conta com uma estrutura completa e preparada para oferecer a melhor experiência acadêmica e de formação prática na área da saúde.
- Os espaços foram planejados para atender tanto às necessidades de aprendizado quanto ao suporte institucional. Veja os ambientes disponíveis:

1 Secretaria

2 Auditório

3 Sala de Treinamento -
Laboratório de habilidades

4 Sala de Treinamento 1

5 Sala de Treinamento 2

6 Sala de Simulação 3

7 Sala de Reuniões 1

8 Sala de Reuniões 2

9 Biblioteca

10 Laboratório de Moldes

11 Banheiros

12 Copa

13 Gerência

VAMOS CONHECER JUNTOS?



SECRETARIA

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

SECRETARIA

Armários guarda-volumes

Bebedouro de água

Espaço para identificação

SECRETARIA



- Ao chegar, apresente-se na Secretaria informando seu nome completo para registro.
- Você também deve deixar seus pertences no local indicado pela equipe.

SECRETARIA



- A Secretaria oferece orientações sobre horários, localização das atividades e esclarece dúvidas relacionadas ao Centro de Estudos.
- Todo o acesso e organização inicial passam por este setor, que é o ponto de apoio para sua permanência na Unidade Acadêmica.

AUDITÓRIO

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

AUDITÓRIO

Mesa para Reuniões

Home theater

Cadeiras com rodízio

Fonte: Acervo Institucional

Equipamentos multimídia

57 Poltronas confortáveis

Poltronas para pessoas com necessidades especiais

Bebedouro de água

Fonte: Acervo Institucional

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

Auditório

APARELHOS MULTIMÍDIA



Contém:

- 2 Televisões preta touch screen LG Qualipix
- 2 Mouses preto sem fio Rappo
- 2 Controles remotos LG
- 2 Teclados pretos sem fio Rappo

SALA DE TREINAMENTO – LABORATÓRIO DE HABILIDADES

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

SALA DE TREINAMENTO - LABORATÓRIO DE HABILIDADES

Dispensers de sabonete líquido e papel toalha

Foco auxiliar

Acessórios hospitalares

Carro para transporte

Lixeira infectante

Simulador Susie Simon S201

Balde a chute


Maca sem rodízios

Biombo

SIMULADORES

Sala de Treinamento – Laboratório de habilidades

SIMULADOR SUSIE SIMON S201

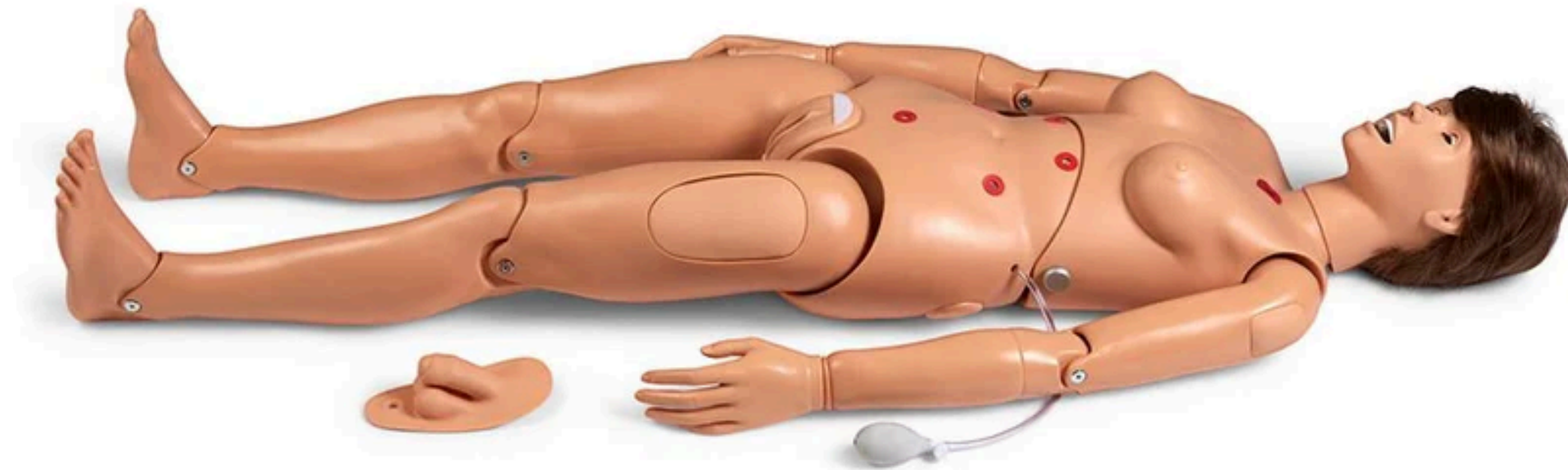

Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/s200.250-s201.250-17.6.1.pdf/>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Apresentação do Simulador de Atendimento ao Paciente:

O Simulador Susie Simon S201 é um manequim adulto projetado para o treinamento baseado em simulação de habilidades clínicas gerais, incluindo treinamento endovenoso, cuidado traqueal, cateterismo, enema, tratamento de ostomia, alimentação nasogástrica, bandagem e entre outros.



CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Habilidades de Enfermagem Geral

- Banho no leito e cuidados de higiene: possui articulações móveis e pele realista para simular o banho e a higiene do paciente.
- Curativos e bandagens: permite a prática de aplicação de curativos em diferentes partes do corpo.



Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Habilidades de Enfermagem Geral

- Cuidado com os cabelos: inclui uma peruca estilosa para exercícios de cuidado capilar e preparação cirúrgica.
- Higiene oral: possui dentes superiores e inferiores removíveis para práticas de higiene bucal.



Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Habilidades de Enfermagem Geral


- Cuidados oftálmicos: olhos realistas que abrem e fecham para exercícios oftálmicos.
- Cuidados otológicos: canal auditivo simulado para administração de gotas e irrigação.



CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Procedimentos Técnicos

- Cateterismo vesical: genitália intercambiável para simular cateterismo masculino e feminino, com passagem uretral e bexiga realistas.
- Administração de enemas: capacidade para prática de administração de enemas.

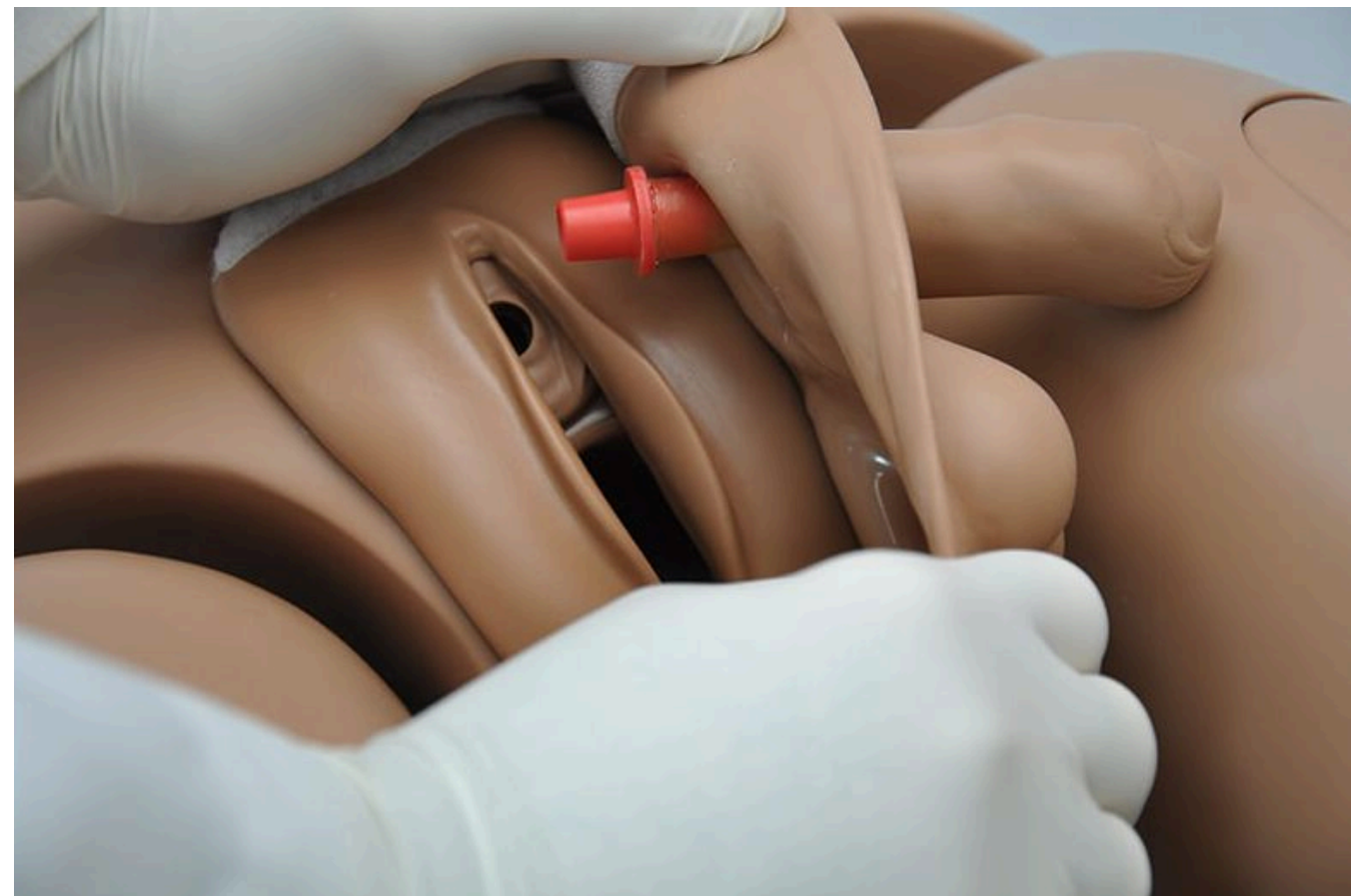


Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Procedimentos Técnicos

- Cuidados com traqueostomia: abertura para inserção e cuidados com tubo de traqueostomia.

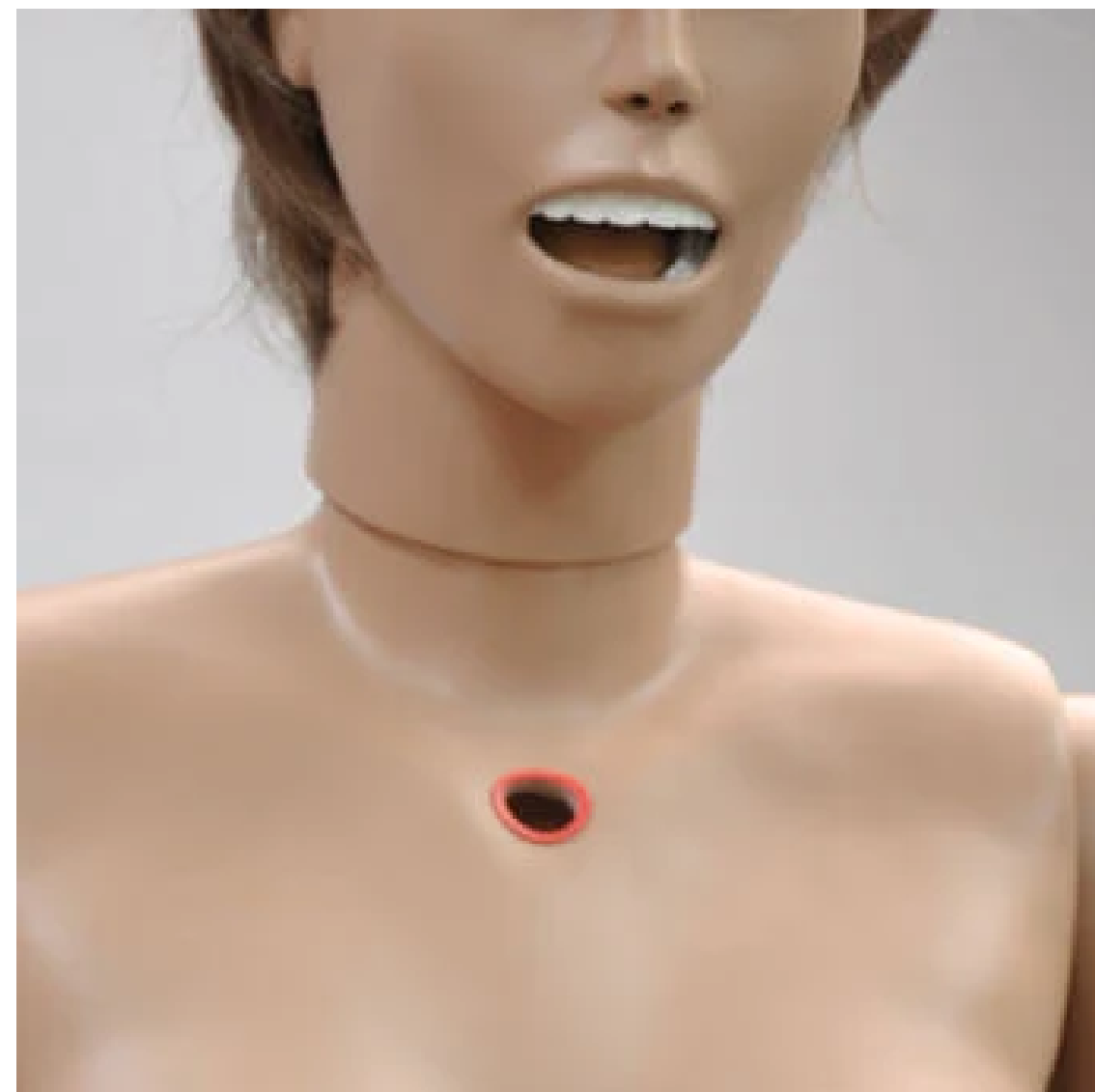


Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Procedimentos Técnicos

- Alimentação por sonda nasogástrica e orogástrica: aberturas na boca e nariz para prática de lavagem e alimentação gástrica.

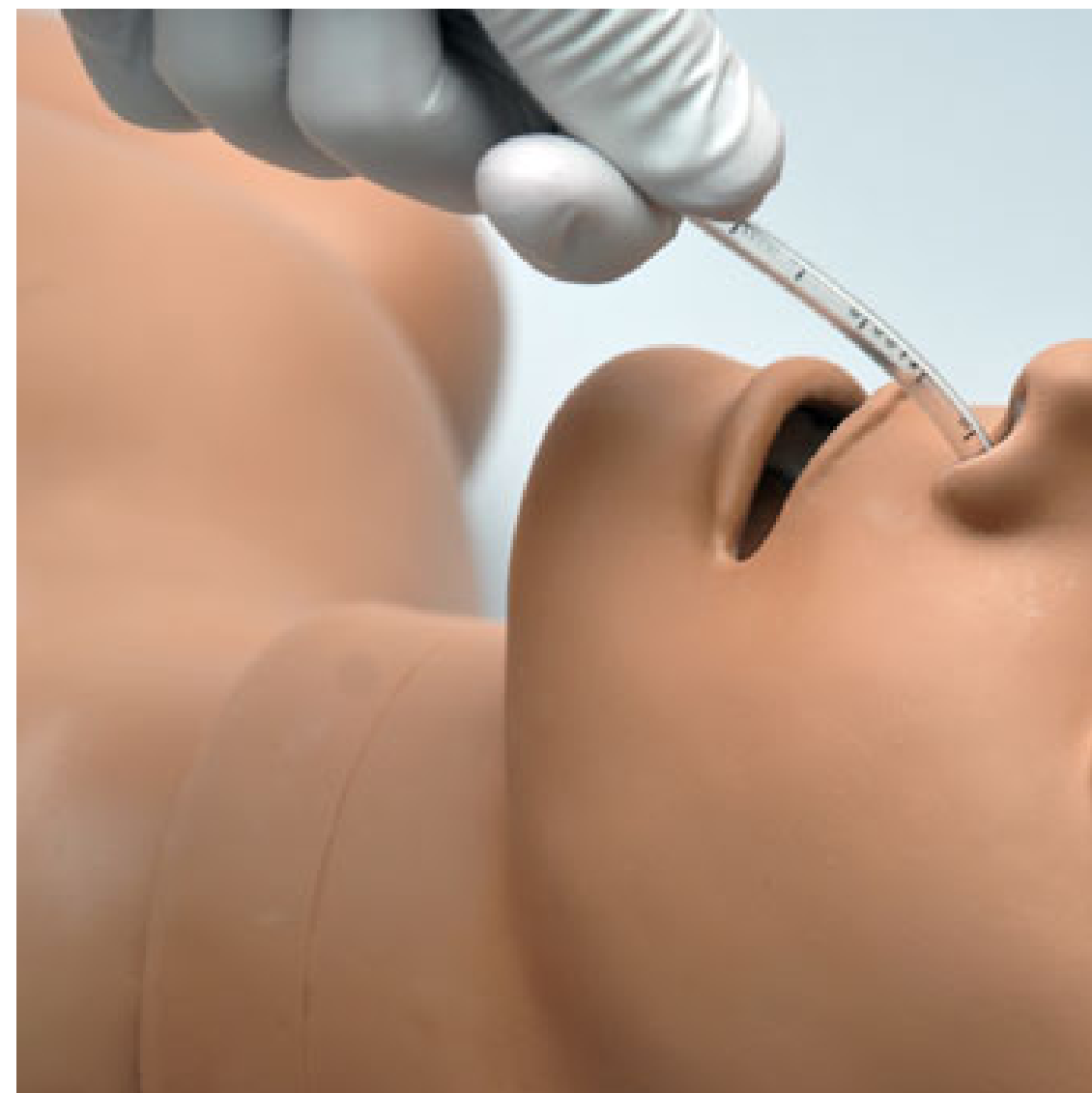


Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf>

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Procedimentos Técnicos


- Injeções intramusculares: locais específicos nos deltoides, vasto lateral e região glútea para prática de injeções.

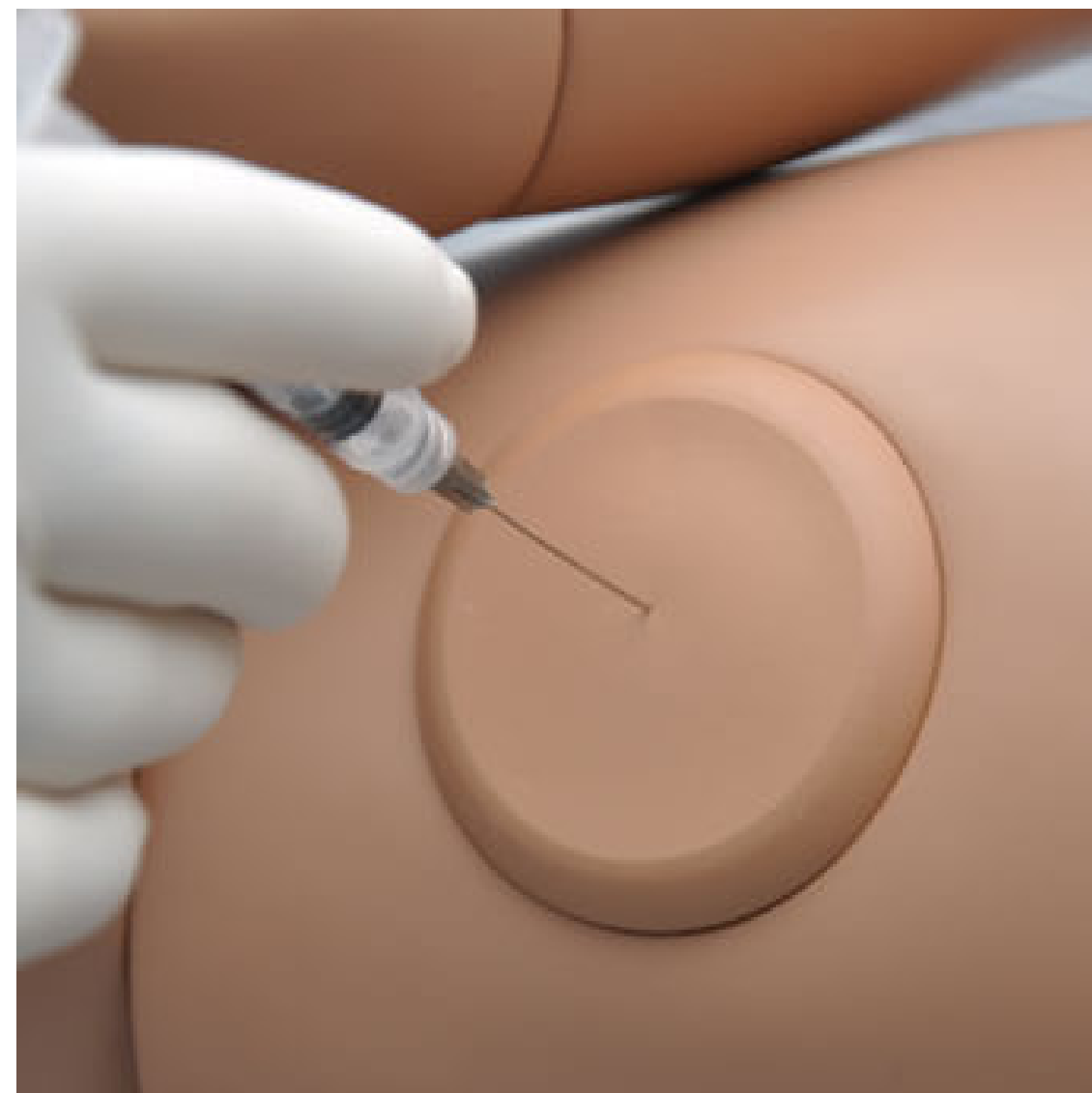

CONHECENDO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Cuidados com Ostomias

- Estomas esculpidos: inclui estomas de colostomia transversa, ileostomia e estoma suprapúbico para prática de cuidados e irrigação.
- Tanques internos removíveis: permitem simular o fluxo de fluídos durante os procedimentos (manual).

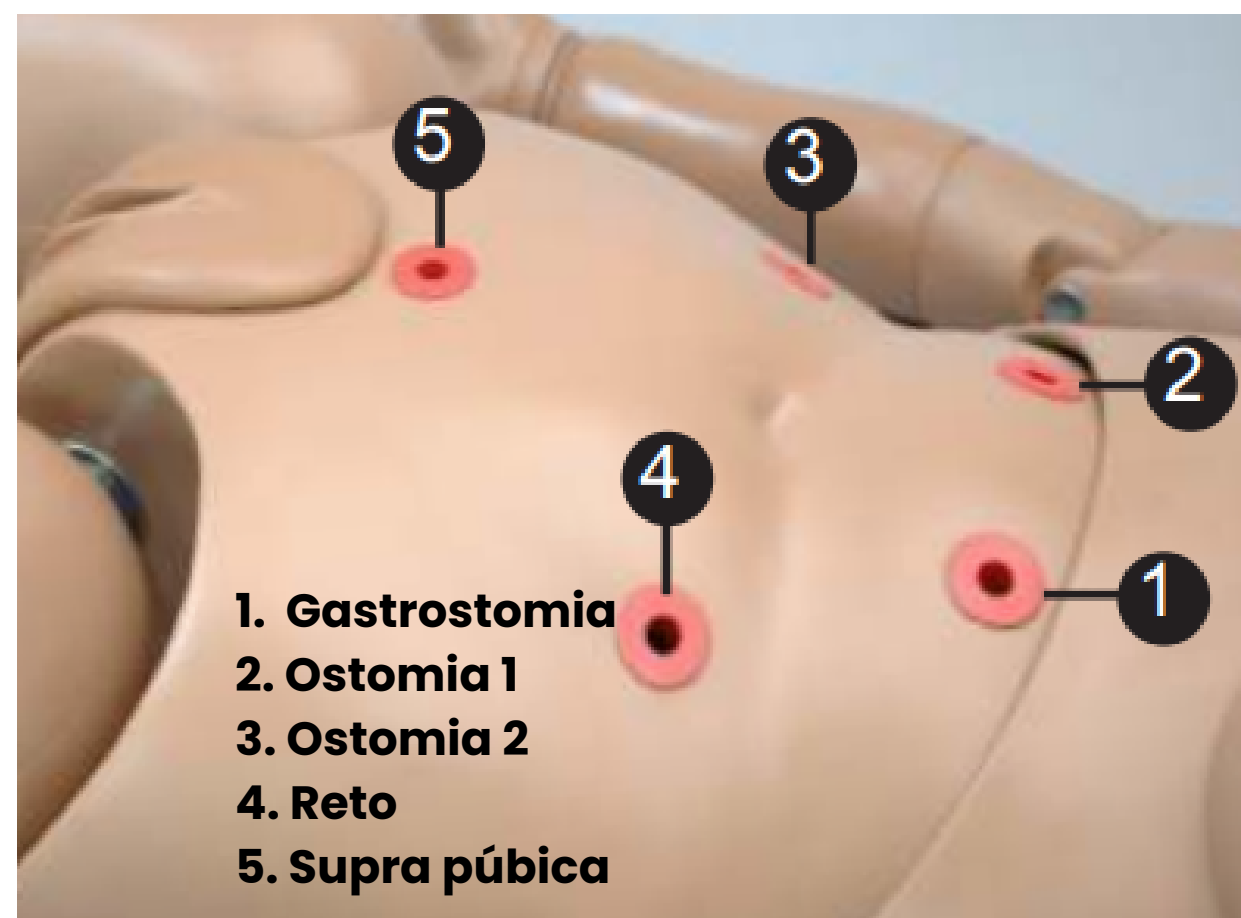

Fonte: <https://gaumard-downloads.s3.amazonaws.com/manuals/S200.250-S201.250-17.6.1.pdf/>

PEÇAS DO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Contém:

- 1 Simulador Susie Simon S201
- 1 Peruca Simulador Susie Simon
- 2 Próteses dentárias de plástico do Simulador Susie Simon (superior e inferior)
- 2 Anexos removíveis do deltoide
- 2 Anexos Removíveis do músculo vasto lateral da coxa
- 2 Peças de ostomia removíveis
- 1 Peça removível de órgão masculino
- 1 Bulbo inflável

Fonte: Acervo Institucional

MANUAL DO SIMULADOR SUSIE SIMON S201

Manual Susie Simon S201 –
Cuidados e Manutenção



Manual Susie Simon S201 –
Simulador de cuidados com
paciente com Ostomia



ITENS

Sala de Treinamento – Laboratório de habilidades

ACESSÓRIOS PARA DEMONSTRAÇÃO



Contém:


- 1 Esparadrupo 10cmx4,5m Adpele
- 1 Sonda Levine 16FR (Mark Med)
- 2 Seringas de 5 ml com agulha 0,7x25mm com Luer Lock
- 1 Caixa de luvas de procedimento (M) Medix Brasil

ACESSÓRIOS PARA DEMONSTRAÇÃO



Contém:

- 2 Equipos fotossensíveis
- 1 Equipo simples
- 2 Sonda levine 14FR
- 1 Cateter tipo óculos adulto
- 1 Cateter para subclávia biocat
- 5 Unidades de isossorbida 5mg - sublingual
- 1 Sonda do tipo Foley 2 vias 10FR
- 1 Dispositivo transdutor de pressão
- 2 Seringas de 20 ml com luer lock e agulha de 0,7x25
- 1 Estetoscópio Premium
- 1 Ressuscitador manual de silicone adulto - Foyomed
- 1 Coletor de urina sistema fechado com filtro - Glomed bag
- 2 Jelcos 16 Polymed (preto)
- 2 Jelcos 18 Polymed (verde)
- 1 Jelco 14 Polymed (laranja)
- 1 Água para injetáveis (ABD)

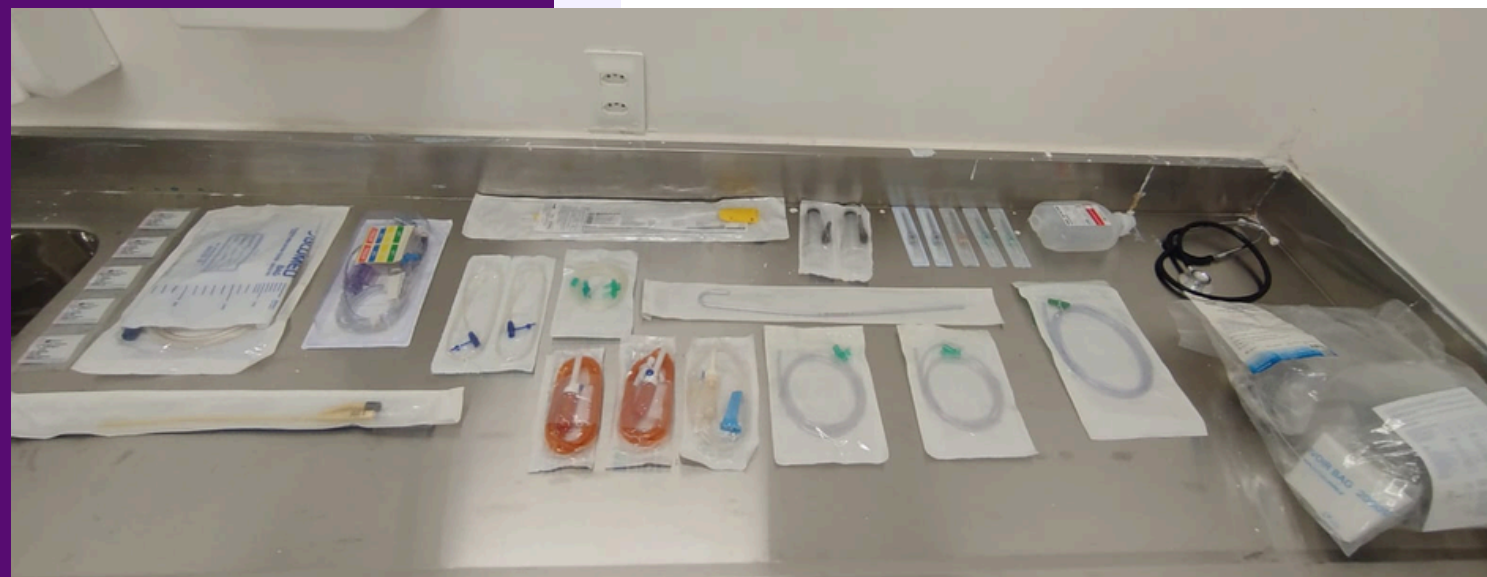

Fonte: Acervo Institucional


RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE - ADULTO



Acessórios do Ressuscitador Manual de Silicone - Adulto

- 1 Máscara de Silicone
- 1 Válvula para Paciente - Policarbonato
- 1 Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone
- 1 Válvula Interna - policarbonato
- 1 Bolsa - Silicone
- 1 Reservatório de oxigênio - EVA, polipropileno - 2000ml
- 1 Tubo de oxigênio - PVC - 2,1 metros
- 1 Manual de instrução

Fonte: Acervo Institucional

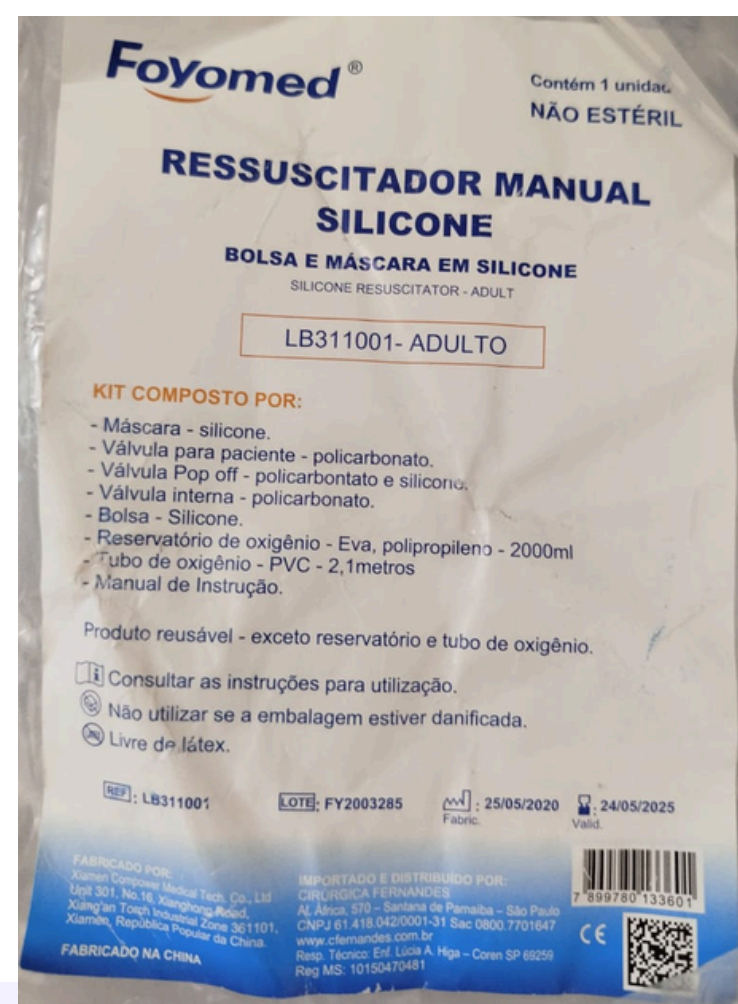


RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE – ADULTO



Manual do Ressuscitador Manual de
Silicone - Adulto

EQUIPAMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO

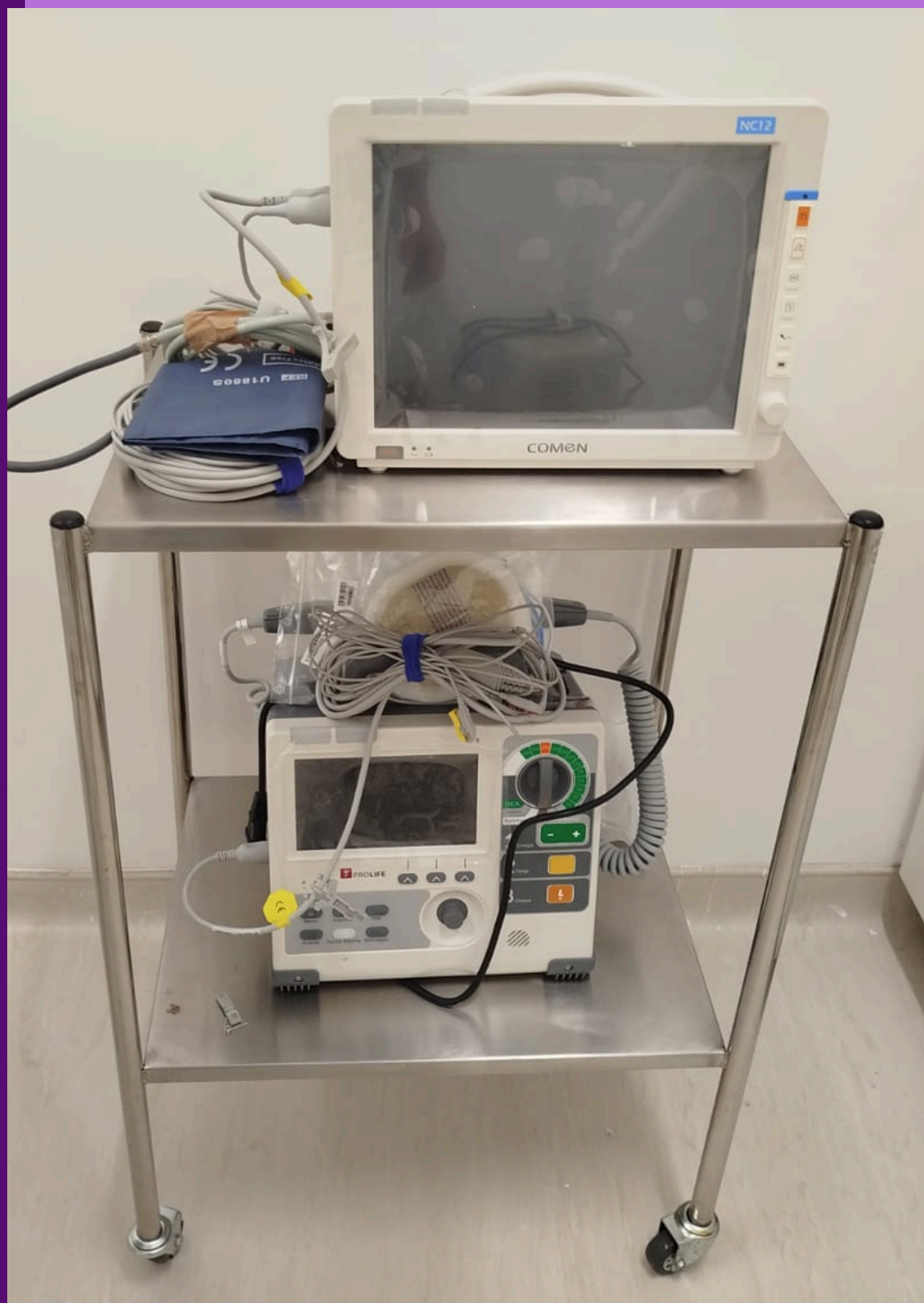

Contém:

- 1 Desfibrilador DF8 PROLIFE
- 1 Monitor Multiparâmetro Comen

ACESSÓRIOS – DESFIBRILADOR

Contém:

- 1. 2 pares de Pás de desfibrilação adesivas externa
- 2. 1 par de Pás de desfibrilação externas de plástico (externo + ápice)
- 3. 1 Conector de fonte de energia



ACESSÓRIOS – DESFIBRILADOR

Contém:

- 4. 1 Cabo com 3 eletrodos para ECG + velcro de fixação
- 5. 12 unidades de adesivo para ECG
- 6. 1 Teste de cabo de terapia + Velcro para fixação
- 7. 1 Cabo de terapia



MANUAL DO DESFIBRILADOR DF8 PROLIFE



Desfibrilador DF8 PROLIFE

ACESSÓRIOS – MONITOR MULTIPARÂMETRO

Contém:

- 1. 1 Transdutor de pressão transparente + cabo de IBP
- 2. 1 Conector de fonte de energia
- 3. 1 Condutor de equalização potencial
- 4. 1 Sensor de SpO2 - oxímetro



ACESSÓRIOS – MONITOR MULTIPARÂMETRO

Contém:

- 5. 1 Manga de pressão sanguínea + cabo NIBP
- 6. 1 Cabo com 5 eletrodos + velcro de fixação
- 7. 12 Adesivos para ECG



MANUAL DO MONITOR MULTIPARÂMETRO COMEN



Monitor Multiparâmetro Comen

SALA DE TREINAMENTO 1

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

SALA DE TREINAMENTO 1



Balança baby

Carro para Transporte

Simulador S500 Obstétrica

Simulador de Versão Cefálica Externa

Simulador Simulacare Bebê

Aparelho de fototerapia

Berço aquecido

Balde a chute + Lixeira

Suporte para soro fisiológico + bomba de seringa neonatal

Fonte: Acervo Institucional

SALA DE TREINAMENTO 1

Bem-vindos à Sala de Treinamento 1!

Este ambiente foi minuciosamente preparado para simular um **espaço de cuidado perinatal**, oferecendo uma experiência prática e realista para o desenvolvimento de habilidades na área da saúde.



SALA DE TREINAMENTO 1

A sala conta com os seguintes Simuladores:

- **Simulador de Versão Cefálica Externa (VCE)** – simulador sensorial utilizado para o treinamento da manobra que promove a mudança da posição fetal para a apresentação cefálica.
- **Simulador Simulacare Bebê** – voltado para práticas de cuidados neonatais.
- **Simulador Susie S500 Obstétrica** – que permite simulações de partos e procedimentos obstétricos.

ITENS

Sala de Treinamento 1

BOMBA DE SERINGA NEONATAL



Bomba de seringa M300 Comen

Fonte: Acervo Institucional

BOMBA DE SERINGA NEONATAL



Manual da Bomba de Seringa Neonatal

BERÇO AQUECIDO

Berço Aquecido Matrix Olidef Medical

Contém:

- 1 Bandeja de suporte superior
- 1 Bandeja de suporte inferior
- 2 Gavetas pequenas (sem chave)
- 1 Gaveta grande (sem chave)
- 1 Bandeja para raio-x

Fonte: Acervo Institucional

ACESSÓRIOS DO BERÇO AQUECIDO




Bandeja de suporte superior:

- 1 Equipo para máquina de infusão 1,50m - branco transparente Biosani
- 1 Equipo para máquina de infusão 2,40m - laranja fotossensível Samtronic
- 2 Micronebulizadores 1,5m Protec
- 1 Reanimador manual infantil Protec
- 1 Ressuscitador manual de silicone neonatal FoyoMed (acoplado ao berço)

Fonte: Acervo Institucional

ACESSÓRIOS DO BERÇO AQUECIDO

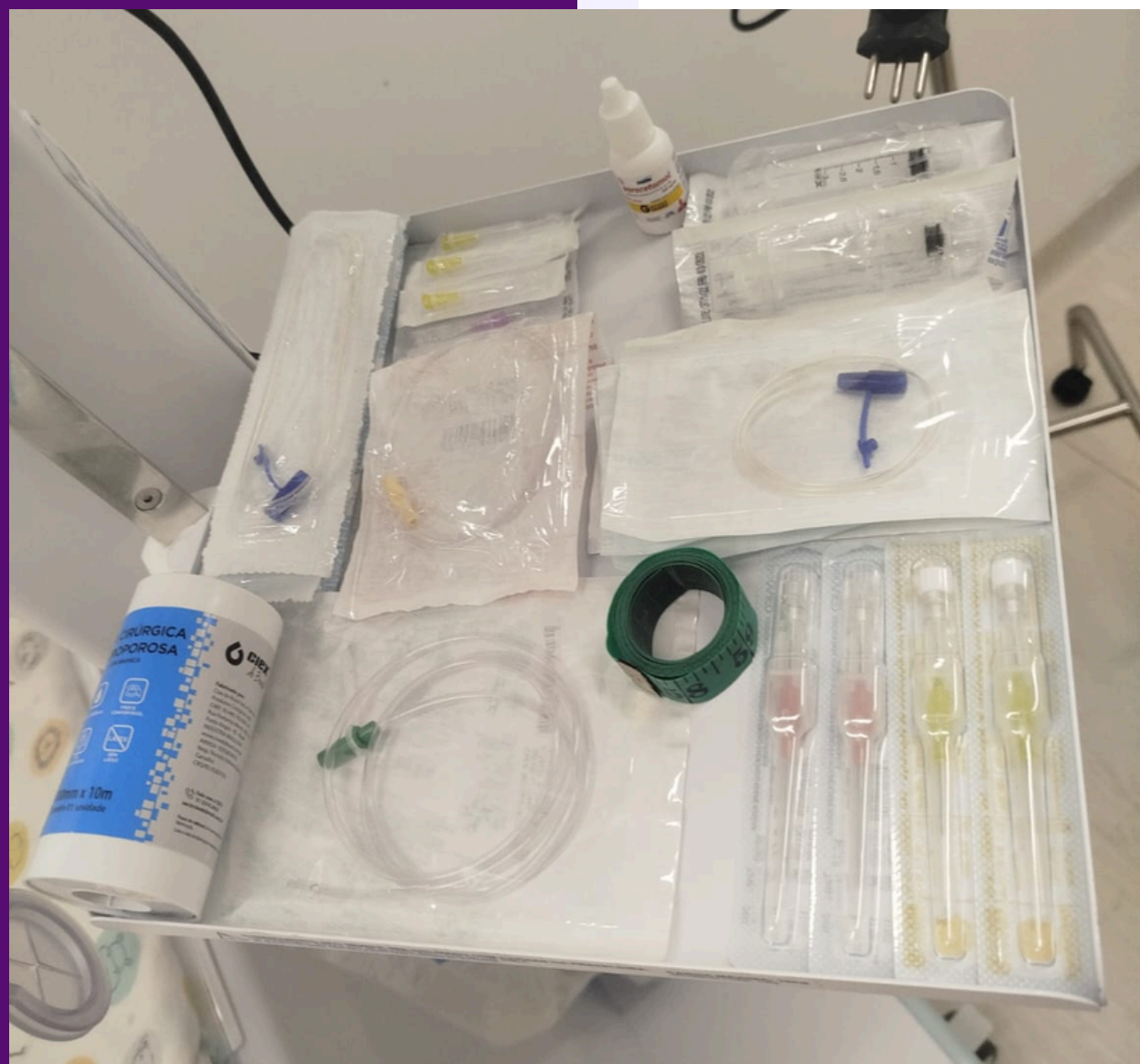


Bandeja de suporte inferior:

- 3 Seringas 3ml - sem agulha Injex/BTRW
- 1 Fita métrica verde Fiber Glass
- 1 Fita cirúrgica microporosa 100mmx10m
- 2 Cateteres nº 20 (laranja)
- 2 Cateteres nº 24 (amarelo)
- 3 Sondas de aspiração traqueal nº 06 Med sonda
- 1 Sonda de aspiração traqueal nº 08 CPL Medicals
- 1 Sonda nasogástrica longa nº10 Mark Med

Fonte: Acervo Institucional

ACESSÓRIOS DO BERÇO AQUECIDO

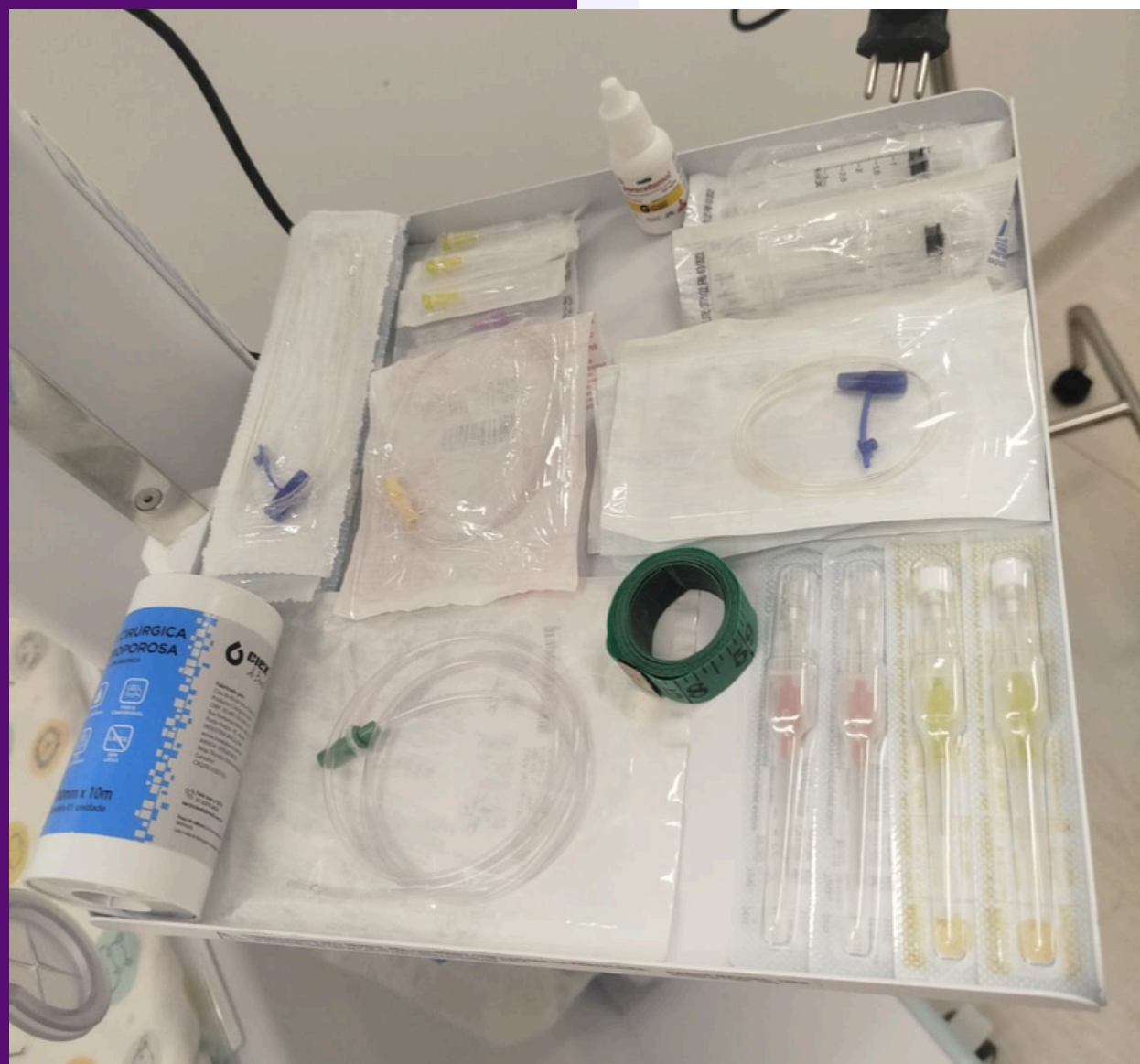

Bandeja de suporte inferior:

- 2 Sondas de aspiração traqueal nº 08 Med sonda
- 2 Sondas de aspiração traqueal nº 10 Med sonda
- 1 Sonda uretral nº 08 Injet Med
- 2 Agulhas 13x0,3mm (amarela)
- 3 Agulhas 20x0,55mm (rosa)
- 1 Paracetamol 200mg/ml - Referência: PC22H315


Fonte: Acervo Institucional

BERÇO AQUECIDO



Manual do Berço Aquecido

RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE - NEONATAL

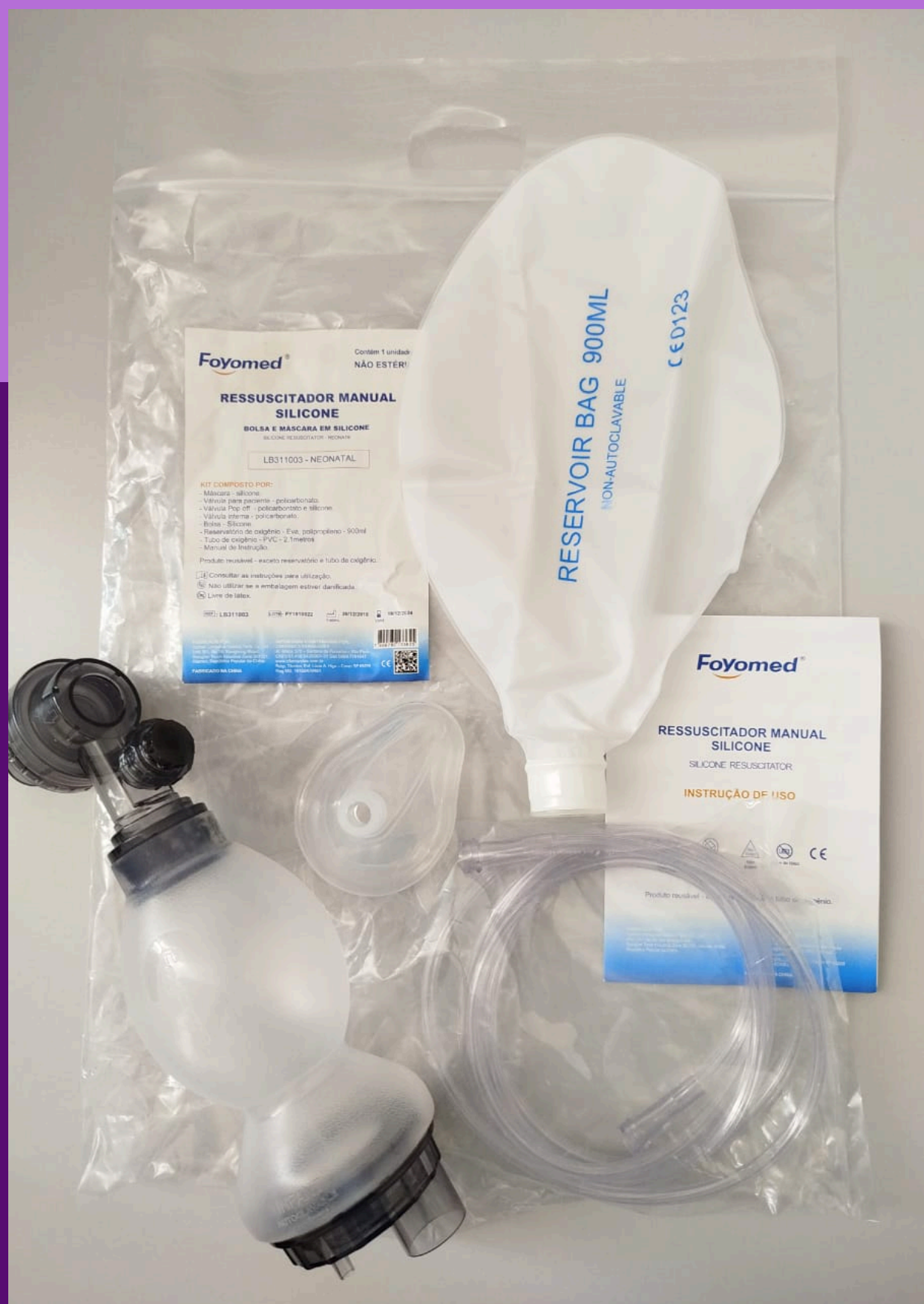

Acessórios do Ressuscitador Manual de Silicone - neonatal

- 1 Máscara de Silicone
- 1 Válvula para Paciente - Policarbonato
- 1 Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone
- 1 Válvula Interna - policarbonato
- 1 Bolsa - Silicone
- 1 Reservatório de oxigênio - EVA, polipropileno - 900ml
- 1 Tubo de oxigênio - PVC - 2,1 metros
- 1 Manual de instrução

Fonte: Acervo Institucional

RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE – NEONATAL



Manual do Ressuscitador Manual de
Silicone - Neonatal

APARELHO PARA FOTOTERAPIA



Aparelho de fototerapia Olidaf Medical
Modelo LED-PHOTO

Fonte: Acervo Institucional

CAMA PPP



As peças em inox da Cama PPP encontram-se guardadas dentro do Carro para Transporte na Sala de Treinamento 1.



MANUAL DO APARELHO DE FOTOTERAPIA



Manual do Aparelho de fototerapia

SIMULADORES

Sala de Treinamento 1

SIMULACARE BEBÊ



Fonte: Acervo Institucional

SIMULACARE BEBÊ

Acessórios do SimulaCare Bebê:

- 1 Manta do Simulador personalizada
- 1 Manta do colchão personalizada
- 1 Chupeta
- 1 Mamadeira
- 1 Solução lubrificante
- 1 Pad para injeção femoral
- 1 Pad para injeção glútea
- 1 Pad para injeção endovenosa
- 1 Órgão masculino
- 1 Lenço umedecido
- 1 Fralda
- 1 Manual de instruções

OBS.: Todos os acessórios encontram-se armazenados nas gavetas inferiores do berço aquecido.

SIMULACARE BEBÊ



Manual de Instruções do bebê -
SimulaCare

PRATICANDO COM O SIMULACARE

O SIMULACARE:

- Possui os principais órgãos internos: pulmões, coração, estômago, sistema intestinal e bexiga;
- Removendo a cobertura do abdome é possível intercambiar os órgãos genitais (masculino/feminino);
- Apresenta cabeça, braço, pernas e quadril móveis.



PRATICANDO COM O SIMULACARE

O SIMULACARE:

- Têm orifícios para aplicação de sondas na uretra - útero - retal.
- Pode realizar **simulação** da alimentação através de sondas nasais e gástricas, aspiração gástrica;



PRATICANDO COM O SIMULACARE

O SIMULACARE:

- Realiza cuidados com a traqueostomia, boca, orelhas, nariz e umbigo.



PRATICANDO COM O SIMULACARE

O SIMULACARE:

- Realiza administração intramuscular na região dorsoglútea, vasto lateral e endovenosa (dorso da mão).
- Pode demonstrar palpação das fontanelas e testículos, cateterização masculina e feminina, inserções para enema, vestir, banho, higiene, técnicas de inserção retal do termômetro.



SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA





Fonte: <https://www.gaumard.com/s500>

SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA



Contém:

- 1 Feto masculino
- 1 Feto feminino
- 1 Pelve
- 6 Cordões umbilicais
- 2 Placentas
- 2 Clamps umbilicais
- 1 Capa de parede abdominal

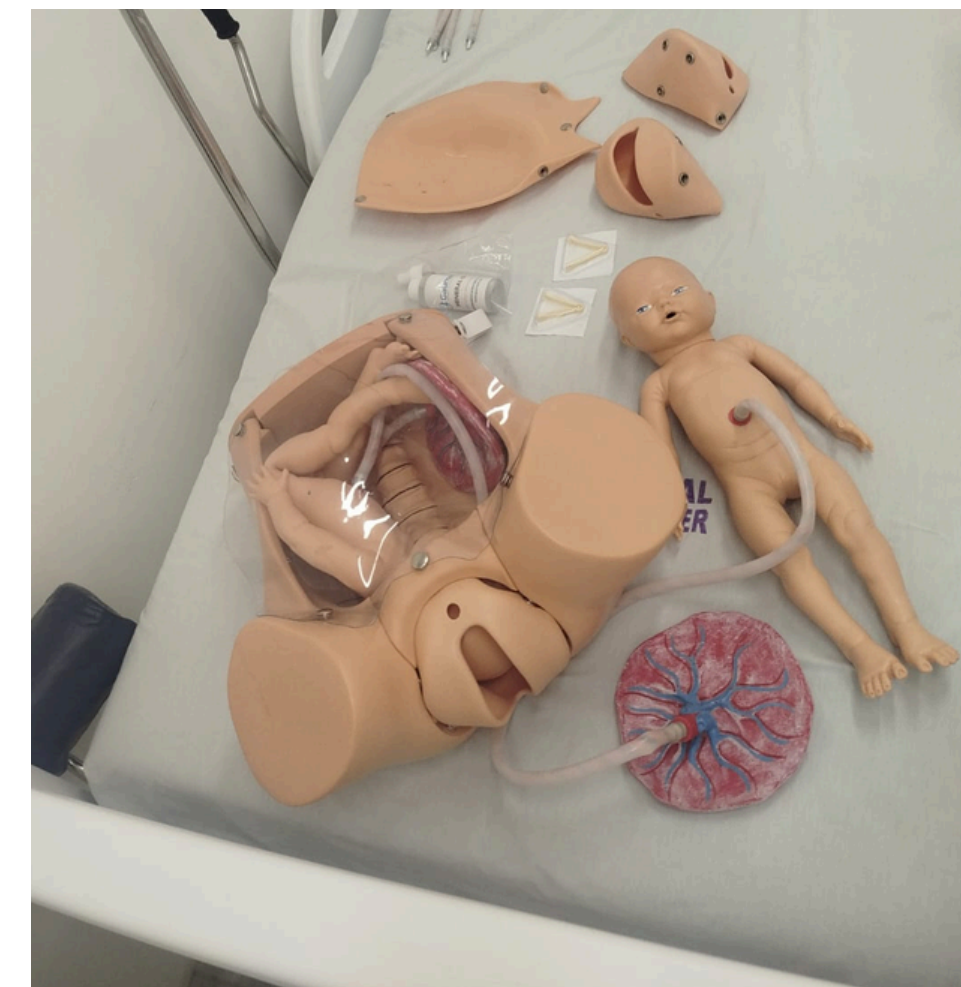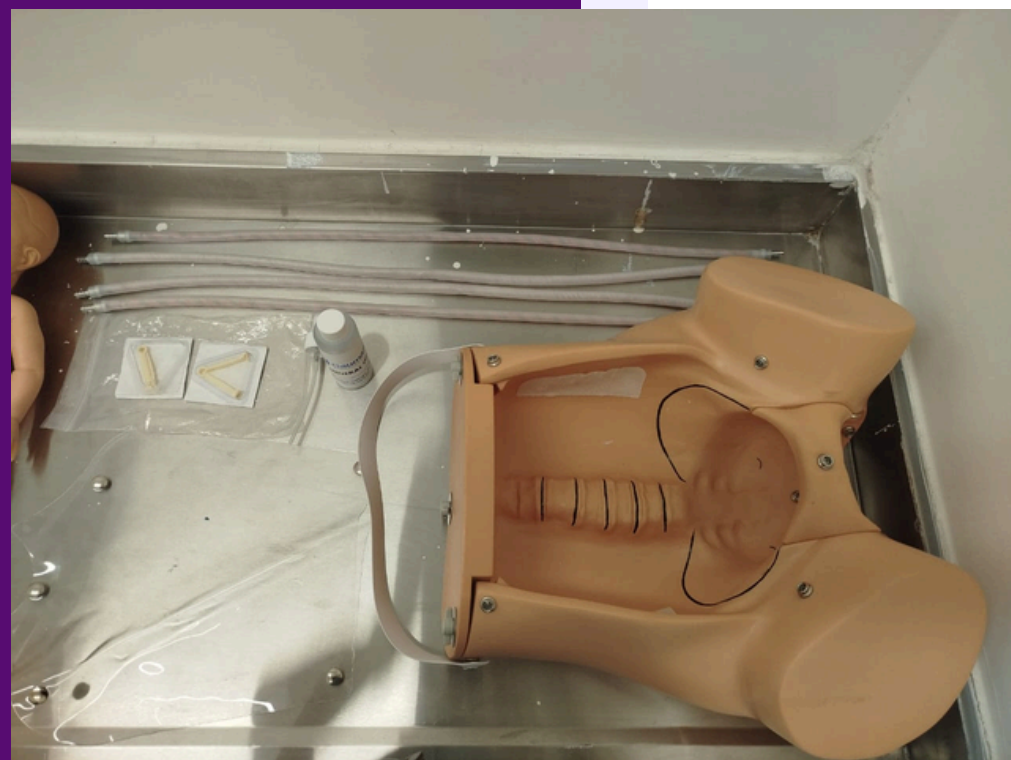

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA

O Simulador de Parto dispõe de:


- Cavidade pélvica com pontos de orientação anatômicos relevantes e contornos das estruturas ósseas da pélvis coloridos. O modelo permite praticar o manejo intrauterino e oferece possibilidades para praticar medidas pré-natais, intraparto e pós-parto.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA

O Simulador de Parto dispõe de:


- Palpação das fontanelas, da coluna vertebral, dos joelhos e dos cotovelos do feto;
- Apresentação cefálica de vértice;
- Parto vaginal normal;
- Parto com apresentação pélvica: completa, franca e podálica;

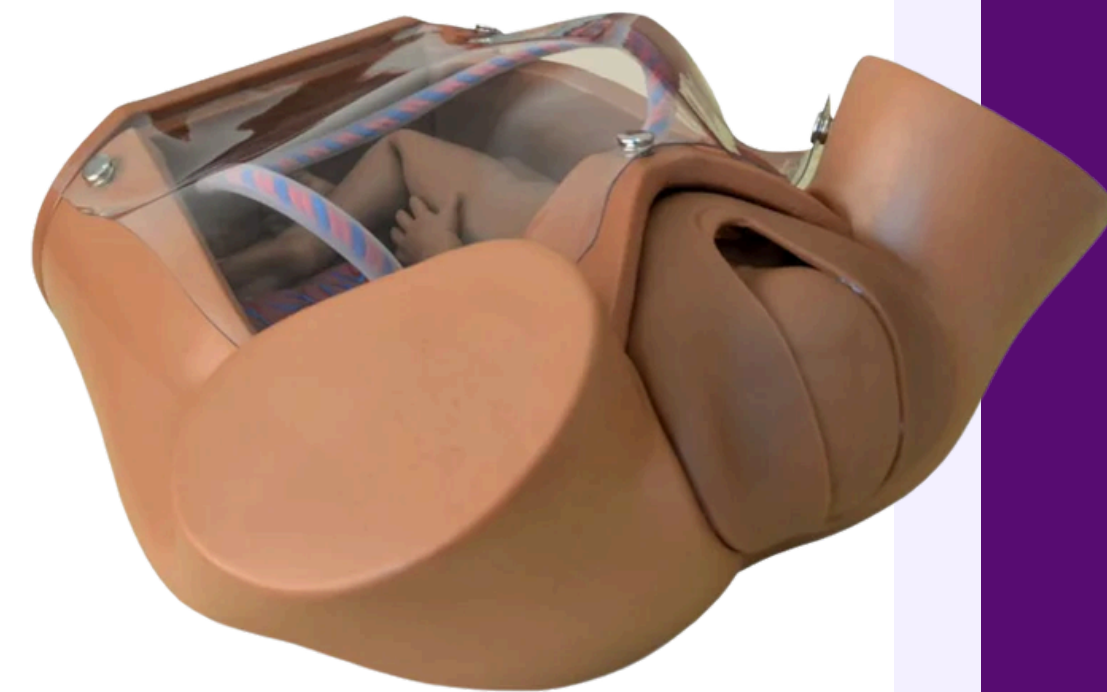

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA

O Simulador de Parto dispõe de:


- Parto com cirurgia cesariana;
- Apresentação cefálica de vértice e pélvica, em partos múltiplos;
- Demonstração de placenta prévia total, parcial e marginal;
- Prolapso do cordão umbilical;

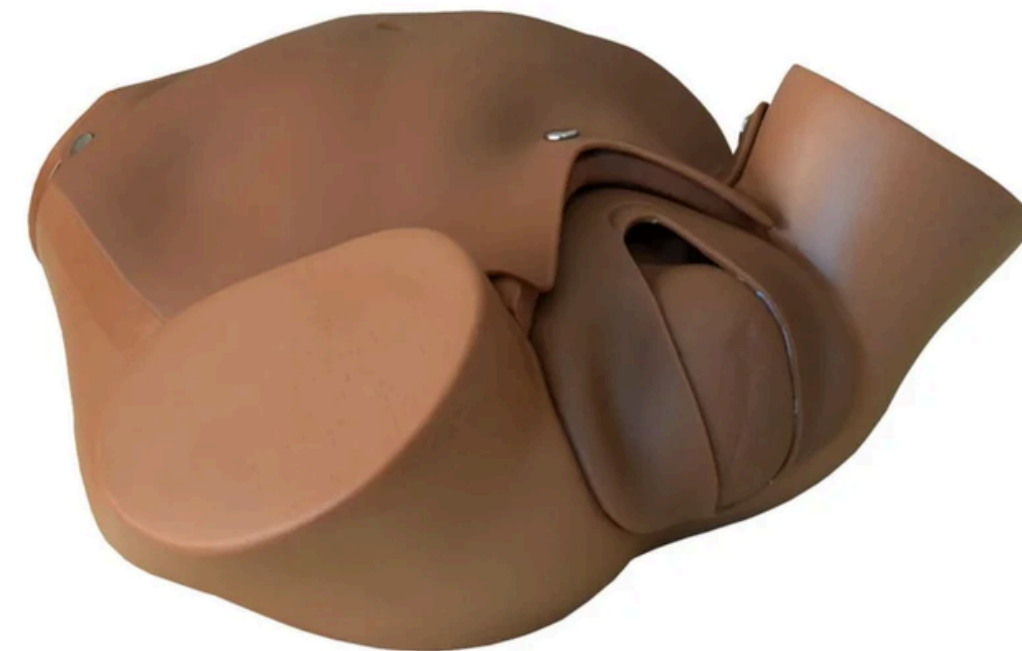

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S500 OBSTÉTRICA

O Simulador de Parto dispõe de:

- 3 inserções de vulva macias para praticar a episiotomia (**corte proibido**);
- Expulsão normal da placenta e do cordão umbilical;
- Simular aspiração pelo nariz e pela boca do bebê.


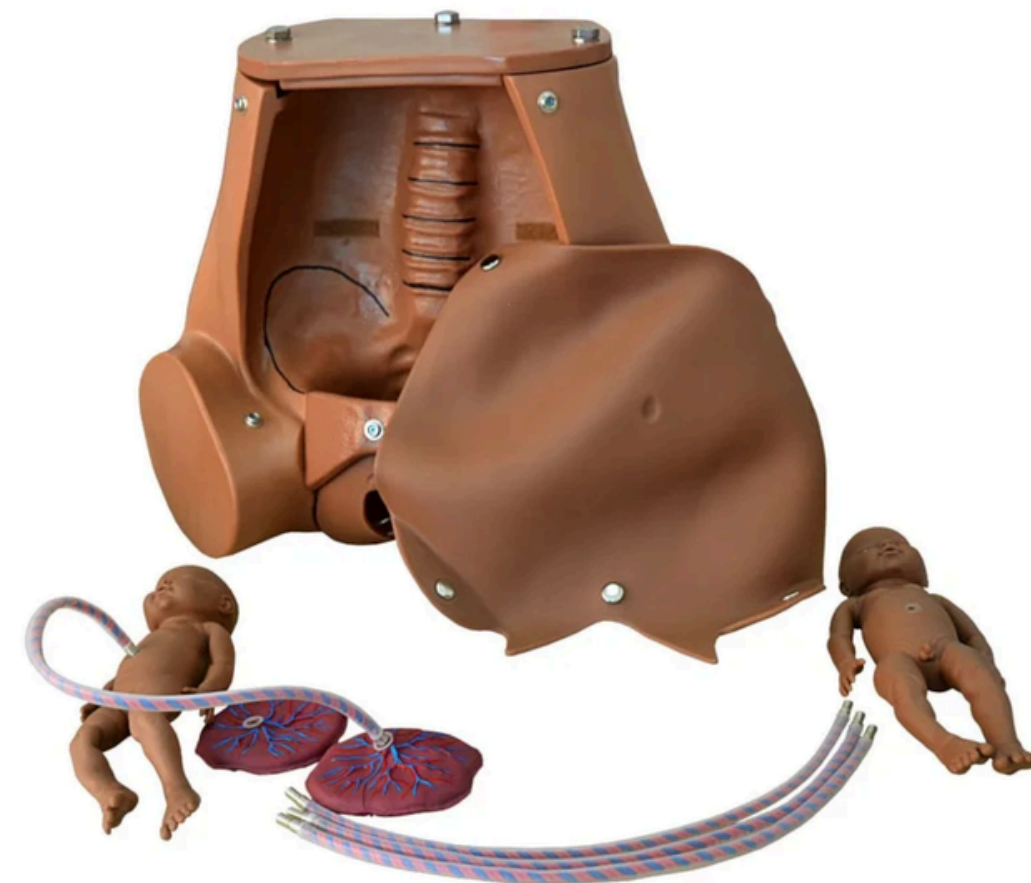


SIMULADOR DE VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA (VCE)



Fonte: <https://simulacao.civiam.com.br/produto/versao-cefalica-externa-vce/>

SIMULADOR DE VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA (VCE)

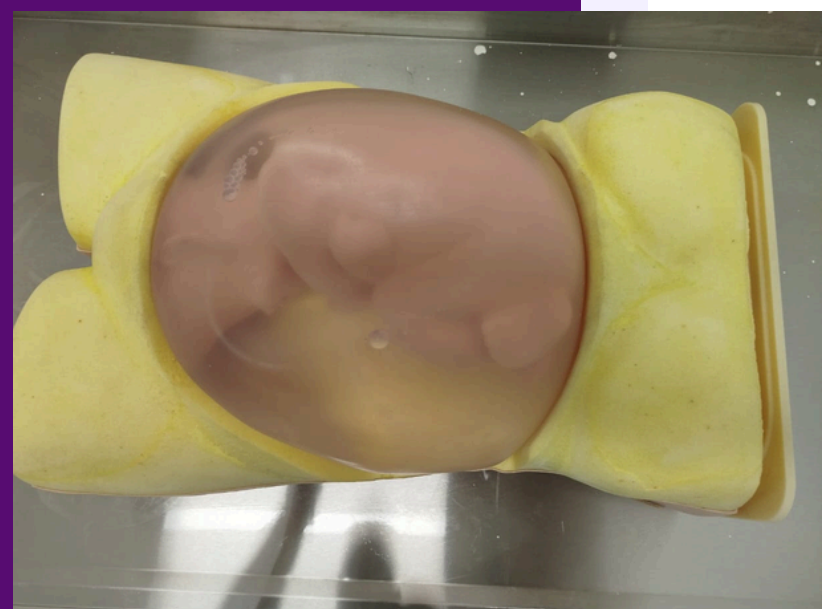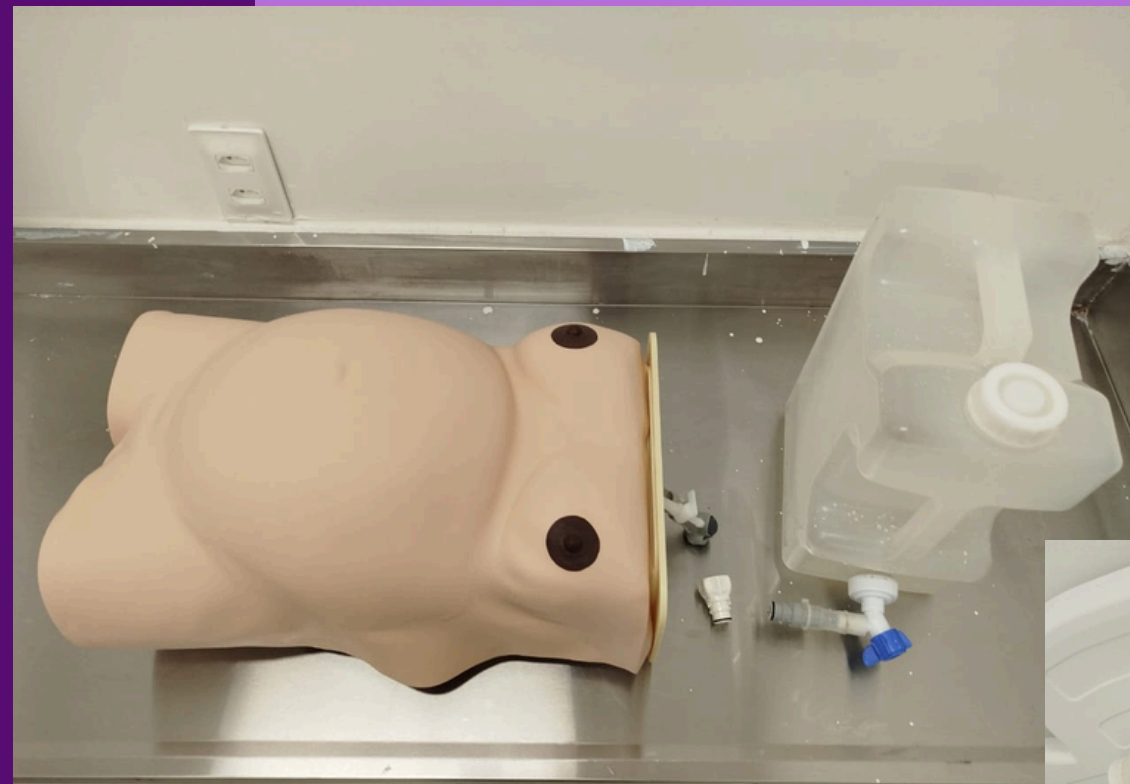

Contém:

- 1 Torso em espuma;
- 1 Saco amniótico com feto;
- 1 Pele abdominal;
- 1 Tanque de Polietileno;
- 1 Acoplador para secagem do saco amniótico.

Fonte: Acervo Institucional

CONHECENDO O SIMULADOR DE VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA (VCE)

O Simulador de Versão Cefálica Externa (VCE) representa a 36ª semana de gestação e possui tamanho e pele que se assemelham ao real.

Pode ser utilizado para:

- Prática de versão cefálica externa (rotação do feto);
- Medição da bacia pélvica;
- Cuidados com as mamas.



CONHECENDO O SIMULADOR DE VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA (VCE)

Manual do Simulador de Versão
Cefálica Externa (VCE)



SALA DE TREINAMENTO 2

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

Armário com chave

1 Mesa e 2 cadeiras

Computador

Negatoscópio

Simulador Ginecológico
S503

1 Mesa de apoio e 2 cadeiras


Biombo + balde a chute + lixeira

SALA DE TREINAMENTO 2

SALA DE TREINAMENTO 2

Bem-vindos à Sala de Treinamento 2!

Este espaço foi especialmente estruturado para o desenvolvimento de competências relacionadas ao **cuidado ginecológico**, com foco na prática segura e na qualificação profissional.

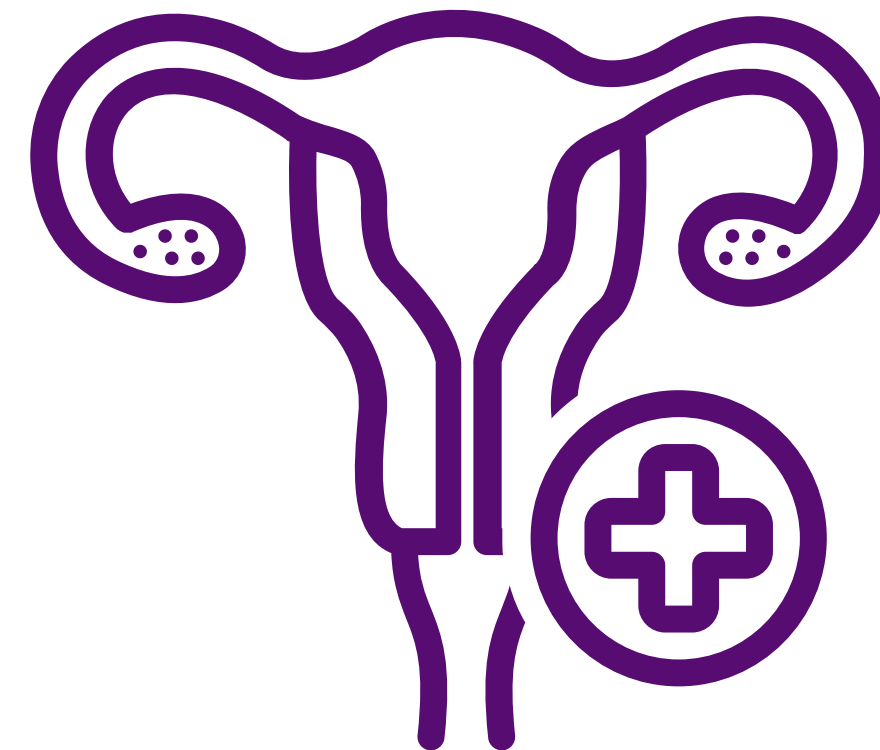

SALA DE TREINAMENTO 2

A sala conta com o **Simulador Ginecológico S503 SIMA GYN/AID**, um recurso avançado que permite a realização de treinamentos em exames ginecológicos e procedimentos clínicos, promovendo o aperfeiçoamento técnico em um ambiente seguro e controlado.



SIMULADORES

Sala de Treinamento 2

SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Fonte: morethansimulators.com/pt-pt/simulador/sima-gynaid-gynaecological-simulator/

SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID


Contém:

- 1 Útero normal em anteversão com ligamentos redondos (parte superior do útero transparente);
- 1 Colo do útero normal pós-parto;
- 6 Colos do útero com condições patológicas externas;
- 1 Útero normal com orifício externo do útero para a introdução e remoção de dispositivos intrauterinos;
- 7 Úteros com condições patológicas;
- 1 Talco;
- 1 Bolsa de transporte.

Acessórios extras:

- 2 coletores plásticos para exames
- 1 Dispositivo intrauterino (DIU)
- 1 Espéculo

Fonte: Acervo Institucional

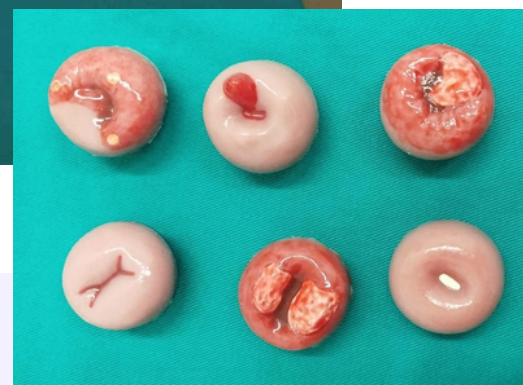

CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Apresentação do Simulador Ginecológico:

A parte inferior do corpo feminino adulto em tamanho real, proporciona aos alunos e educadores uma experiência no exame do espécúlo vaginal, exame pélvico bimanual, técnicas de inserção do DIU, dimensionamento e ajuste do diafragma, sondagem uterina e visualização de colos de útero normais e anormais.



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

É possível realizar:

- Inspeção da vulva e da vagina;
- Exame com espéculo vaginal;
- Exame pélvico bimanual;
- Inserção e remoção da esponja contraceptiva;



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

É possível realizar:

- Inserção e remoção de dispositivos intrauterinos (DIU);
- Sondagem uterina (exame especular);
- Inserção e remoção do preservativo feminino;
- Inserção e remoção do diafragma e do capuz cervical.



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Colo do útero pós parto normal (0)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Cervicite purulenta aguda (1)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Colo do útero com laceração linear (2)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Pólipo cervical (3)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Cisto de Naboth inflamado (4)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Câncer de células escamosas do colo do útero (5)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Sobre o colo do útero:

- Erosão cervical com algum muco (6)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero com marcada anteversão-anteflexão (1)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero com mioma submucoso (2)

CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero com salpingite aguda do lado direito (3)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero com cisto ovariano no lado esquerdo (4)

CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero normal com retroversão moderada (5)

CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID

Das manifestações uterinas:

- Útero com salpingite (hidrossalpinge) no lado direito (6)



CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Das manifestações uterinas:

- Útero com salpingite (hidrossalpinge) no lado esquerdo (7)

CONHECENDO O SIMULADOR GINECOLÓGICO S503 SIMA GYN/AID



Manual do Simulador ginecológico
S503 SIMA GYN/AID

SALA DE SIMULAÇÃO 3

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira


SALA DE SIMULAÇÃO 3

Bem-vindos à Sala de Simulação 3!

A Sala de Simulação 3 foi criada para ajudar no desenvolvimento de habilidades práticas usadas no **Centro Cirúrgico**, em um ambiente seguro e controlado. Aqui, os profissionais treinam atividades como preparação e utilização de equipamentos cirúrgicos, realização de procedimentos, além da aplicação dos protocolos de segurança para garantir um atendimento adequado.

SALA DE SIMULAÇÃO 3

Este espaço conta com o **Simulador Susie S901**, um simulador de paciente de alta fidelidade, projetado para a simulação de práticas como: avaliação de sinais vitais, administração de medicamentos, comunicação com a pessoa em cuidado, entre outras intervenções fundamentais para a formação profissional, detalhadas neste Guia Virtual.

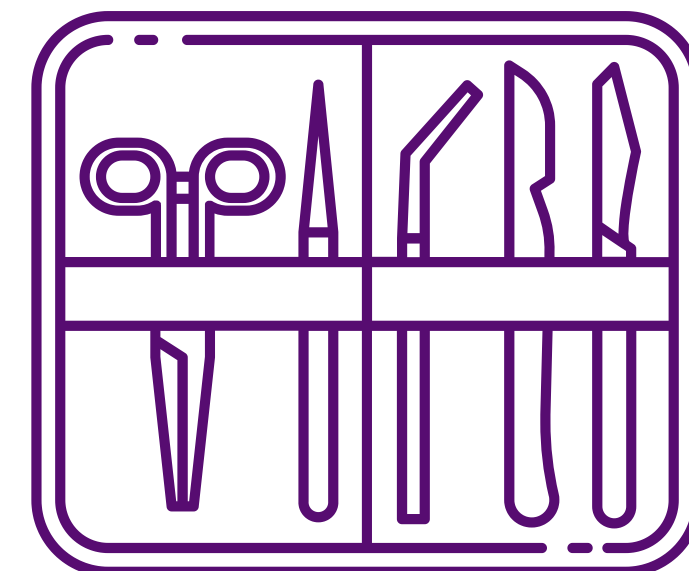

SALA DE SIMULAÇÃO 3

Foco cirúrgico

Estação de anestesia

Carro de transporte

simulador Susie S901

Mesa auxiliar

Monitor multiparâmetro

Bisturi elétrico

Aspirador cirúrgico

Mesa cirúrgica motorizada

Balde a chute


Carro de emergência

Fonte: Acervo Institucional

SIMULADORES

Sala de Simulação 3

SIMULADOR SUSIE S901

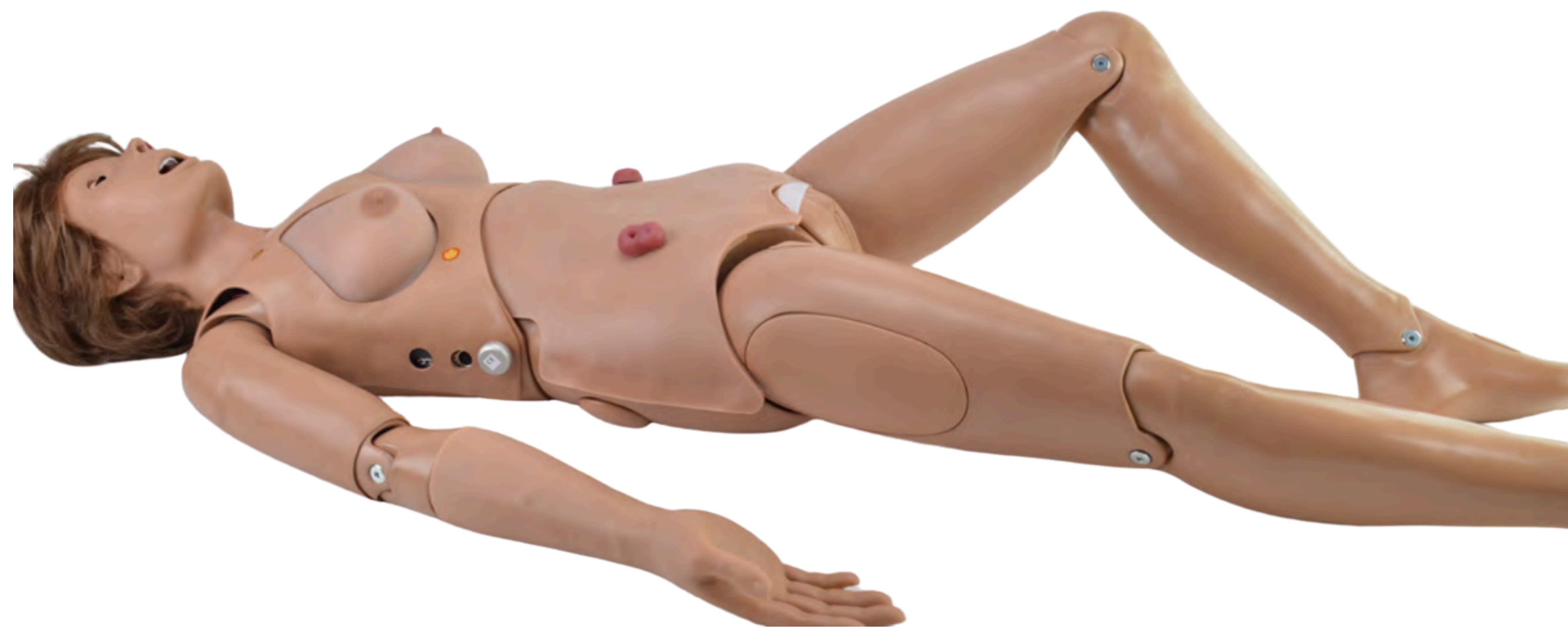

SIMULADOR SUSIE S901

Contém:

- 1 Manequim
- 1 Tablet OMNI 2*
- 1 Genitália masculina
- 1 Óleo mineral*
- 1 Talco em pó*
- 2 Estomas*
- 1 Fita adesiva*
- 1 Kit de administração endovenosa*
- 1 kit de enchimento de bexiga*
- 1 Fone de ouvido streaming áudio*
- 1 Colo uterino normal (instalado)
- 1 Esfigmomanômetro de pressão arterial modificado*
- 3 Manuais do usuário (Gerência)
- 4 Lesões de decúbito - estágio I, II, III e IV.*

Obs: Todos os itens marcados com asterisco (*), ficam guardados no carro de transporte da Sala de Simulação 3. Para uso, solicitar chave à Secretaria.


CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

O Susie S901 é um simulador avançado de paciente, utilizado no treinamento clínico. Ele oferece uma ampla gama de atividades e procedimentos que podem ser praticados para aprimorar habilidades clínicas.

Manual do Simulador Susie S901



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

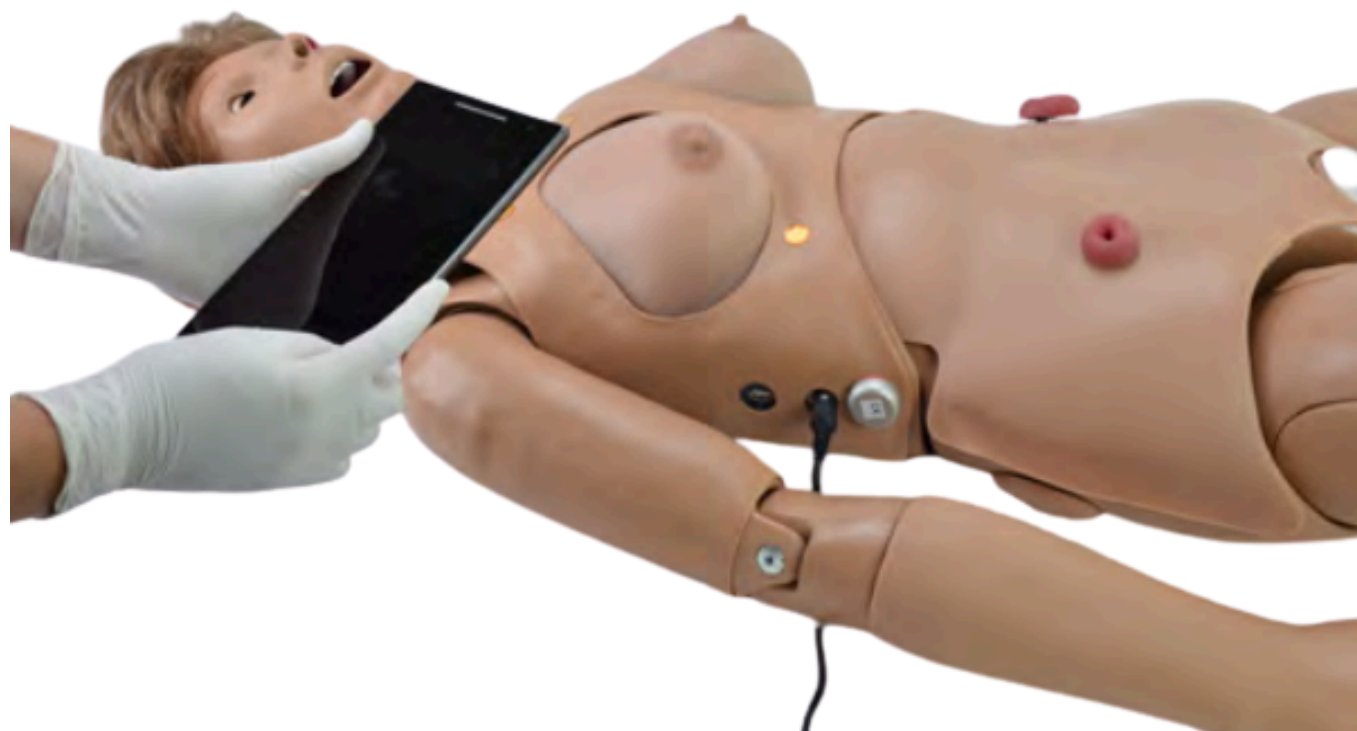

O Simulador Susie S901 acompanha um Tablet com OMNI 2, que monitora o desempenho e captura as ações dos participantes para sessões de debriefing, ricas em dados. É simples de operar, com controles touchscreen e um layout que permite gerenciar mudanças fisiológicas.

Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901



Manual do Tablet com OMNI 2 –
acesso à Susie S901

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

O Simulador Susie S901 inclui 10 cenários interativos, que estão aprofundados no Manual:

- Infarto Agudo do Miocárdio;
- Síndrome de desconforto respiratório agudo secundário a acidente de veículo motorizado;
- Ataque de asma;
- Exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- Desequilíbrio de fluidos e eletrólitos;

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

O Simulador Susie S901 inclui 10 cenários interativo, que estão aprofundados no Manual:



- Insuficiência cardíaca;
- Hipoglicemia;
- Diabetes de início recente;
- Pneumonia;
- Sepses.

PRINCIPAIS ATIVIDADES POSSÍVEIS

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Respiratórios:

- Manejo de vias aéreas, incluindo intubação nasogástrica e orogástrica;
- Aspiração de secreções;
- Cuidados com traqueostomia;
- Ventilação com balão e monitoramento de sons pulmonares.

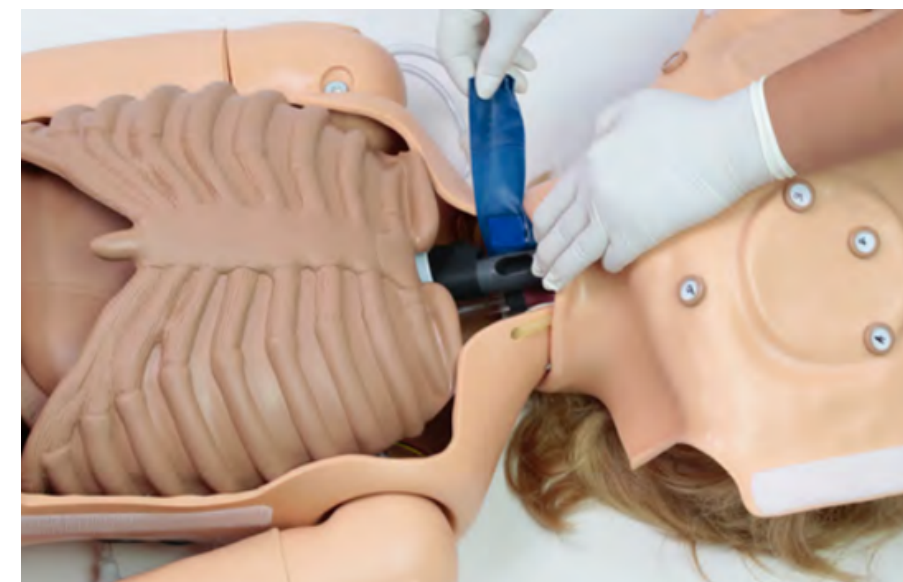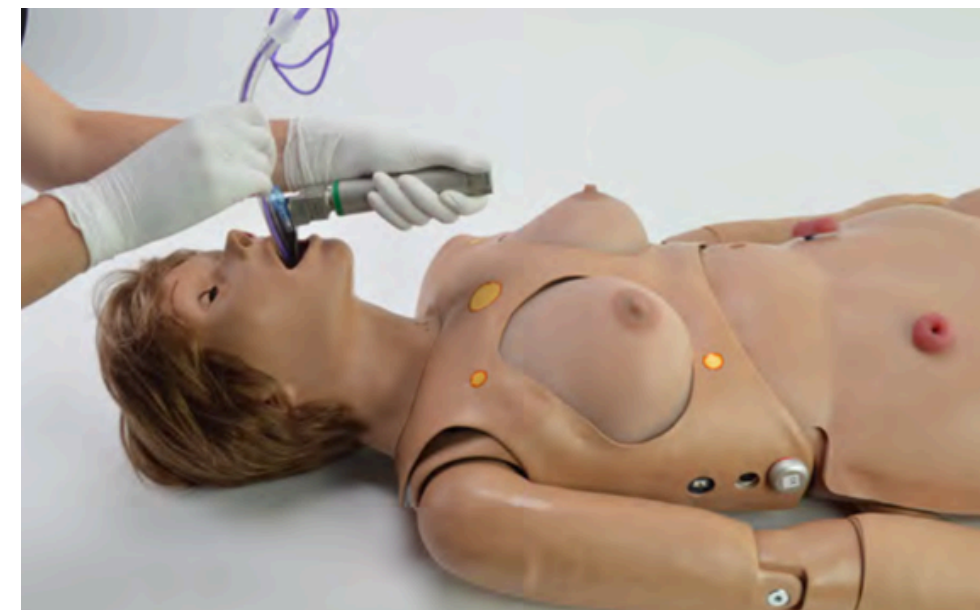

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

É fundamental utilizar os tamanhos corretos de dispositivos em cada procedimento. Ao lado, apresentamos as recomendações padrão Segundo o Manual do Simulador Susie S901:

Procedimento	Tamanho de dispositivo recomendado
Intubação (tamanho da lâmina)	Miller 4 ou MAC 3.5
LMA (Laryngeal Mask Airway) - Máscara Laríngea	Tamanho 4
Intubação Nasal	8 mm de diâmetro externo máximo
Intubação Oral	TET 7.0 mm ou 7.5 mm (sem manguito)
Tubo de traqueostomia	6,0 mm a 8,0 mm (sem manguito)
Cateter urinário	16 Fr



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

É essencial também utilizar a quantidade de líquidos adequada em cada procedimento. Ao lado, apresentamos as recomendações padrão Segundo o Manual do Simulador Susie S901:

Reservatório	Capacidade Máxima
Estômago	750 ml
Bexiga	180 ml
Reto (colostomia)	1800 ml
Ileostomia	650 ml
Canal auditivo	10 ml



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Neurológicos:

- Avaliação de respostas neurológicas, incluindo reflexos pupilares;
- Realização de avaliações neurológicas completas.



Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Gastrointestinais:

- Administração de alimentação, via sonda nasogástrica;
- Suporta alimentação nasogástrica e aspiração com fluidos reais;



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Gastrointestinais:

- Cuidados com ostomias, como colostomia e ileostomia;
- Administração de enemas e cuidados relacionados.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Urológicos:


- Apresenta genitália masculina/feminina intercambiável, que permite cateterismo;



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Inserção de DIU:

- É possível realizar inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU).

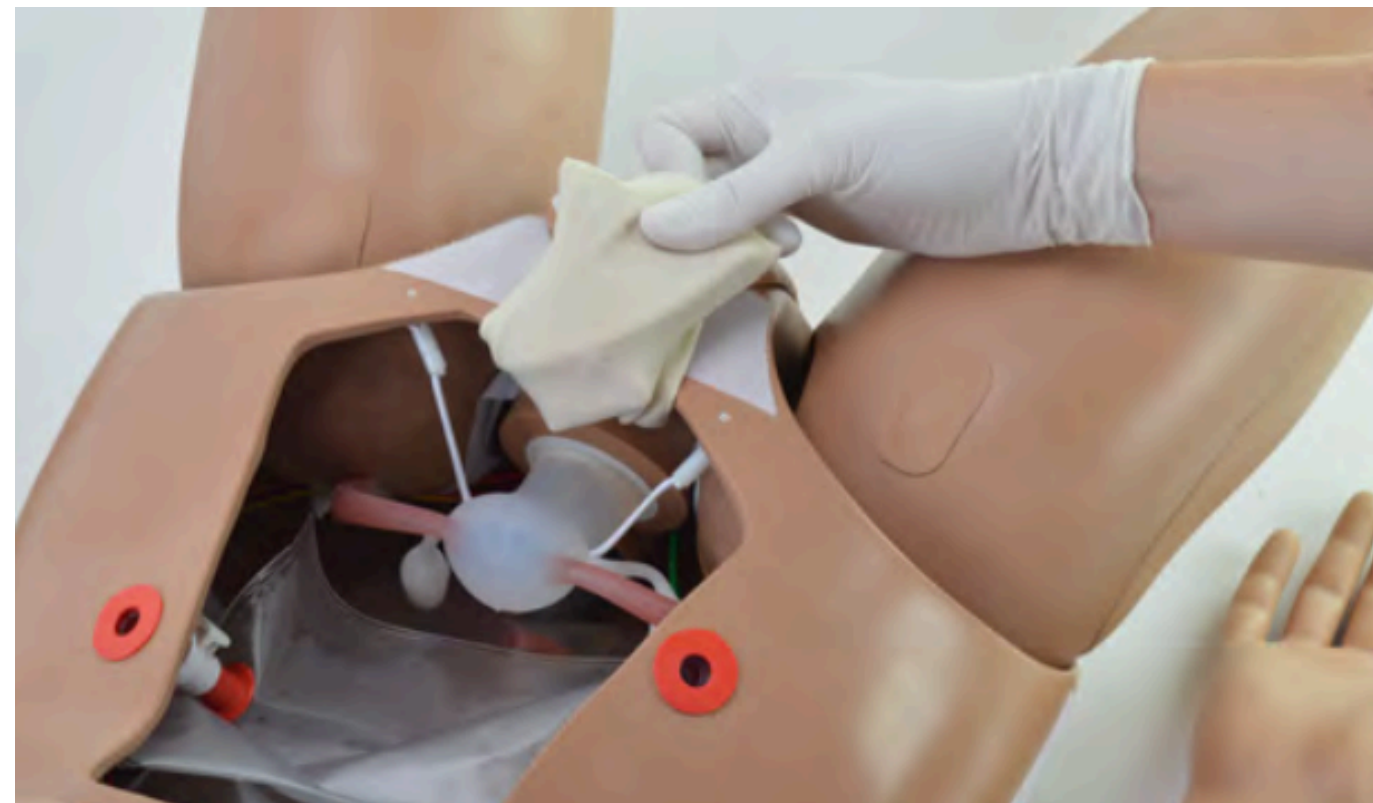

Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Circulatorios:


- Realização de compressões torácicas e ventilação durante manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP);
- Ausculta de sons cardíacos;
- Medição de pressão arterial;



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Cuidados Circulatórios:

- Palpação de pulsos periféricos bilaterais (radial, femoral, carotídeo e pedioso).

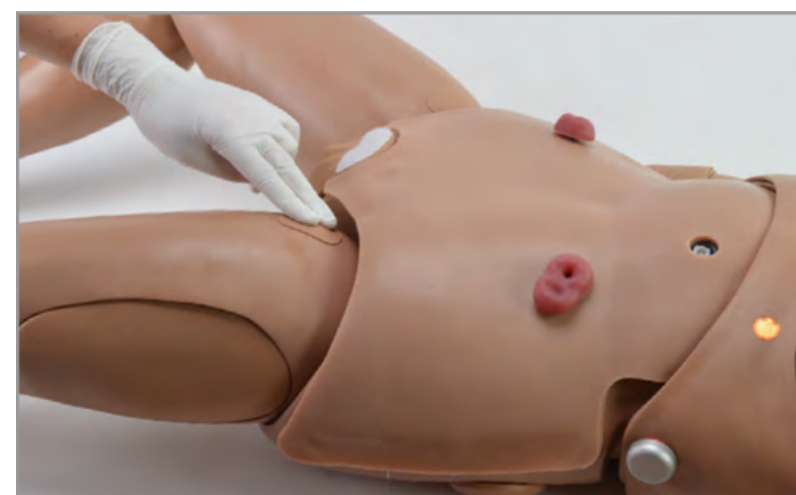

Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de Administração parenterais e não-parenterais:


- Os braços bilaterais de infusão endovenosa podem ser usados para infusão, coleta de sangue, triagem de tuberculose e exercícios para administração por vias subcutâneas.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de Administração Intramuscular:

- O simulador inclui locais para injeção intramuscular bilateral (deltoides, vasto lateral e dorso glúteo).
- **É proibido injetar fluidos nos locais de administração intramuscular.**

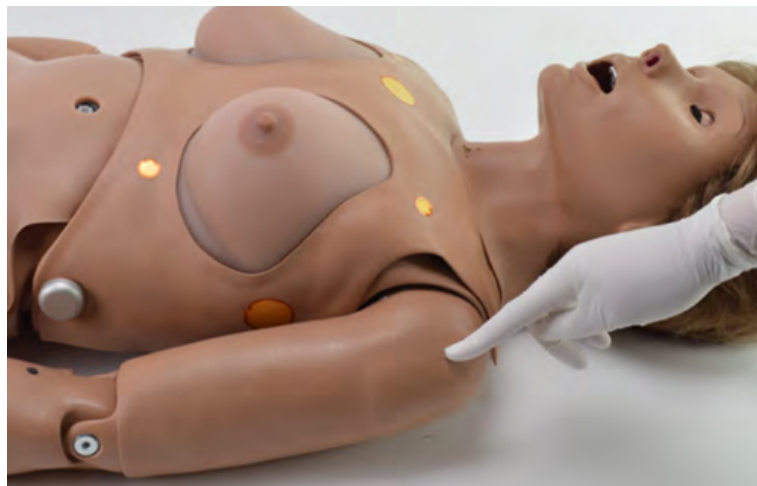

Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de lesões de decúbito:

- É possível visualizar lesão em estágio I, II, III e IV.




Fonte: gaumard.mogiglass.com.br

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de lesões de decúbito:


- Lesão Estágio I (I) – Pele com eritema não branqueável em pele intacta.

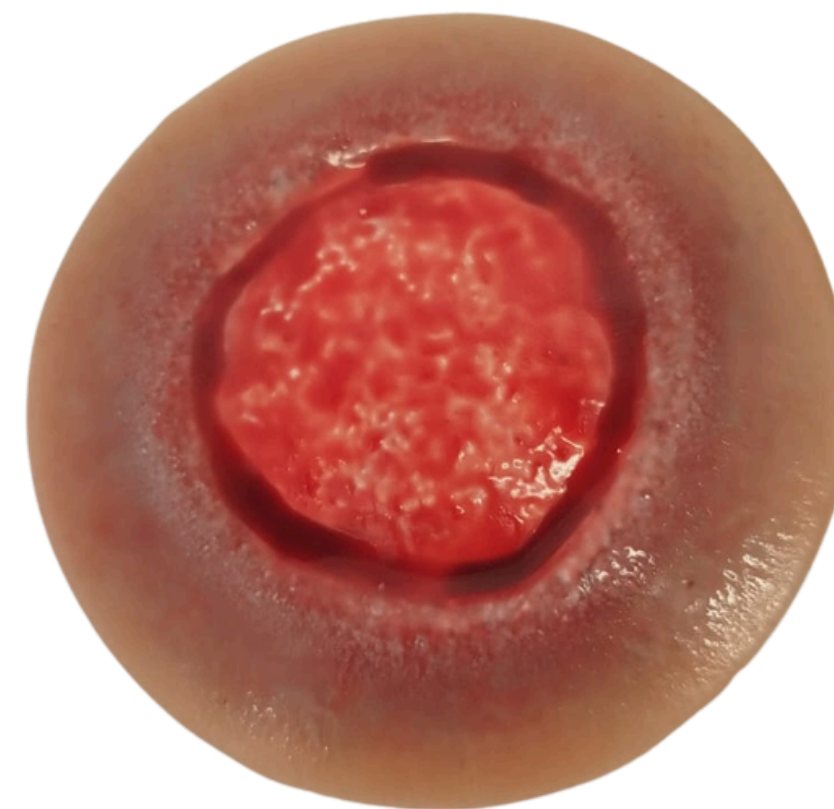

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de lesões de decúbito:

- Lesão Estágio II (II) – Área afetada com região avermelhada (eritema persistente) e ulceração leve. Tecido epitelial comprometido.

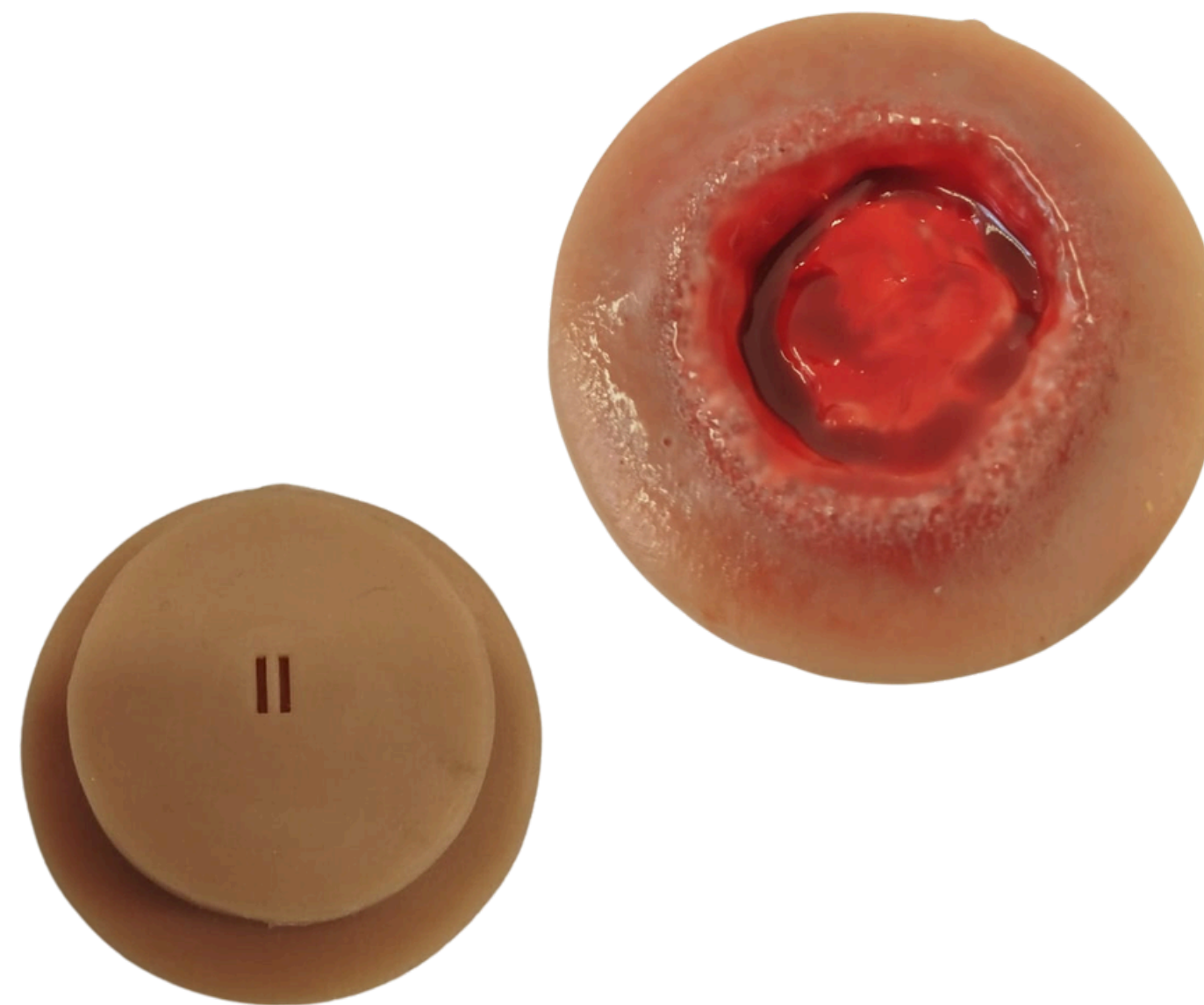

CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de lesões de decúbito:

- Lesão Estágio III (III) – Perda total da espessura da pele e tecido subcutâneo visível. Presença de esfacelo, mas sem exposição de ossos, tendões ou músculos.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Simulação de lesões de decúbito:

- Lesão Estágio IV (IV) – Perda total da espessura da pele e exposição de músculos, tendões e ossos. Presença de esfacelo.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Monitoramento e Uso de Equipamentos:

- Conexão de eletrodos de ECG reais para monitoramento de ritmos cardíacos;
- Uso de desfibrilador real para captura e cardioversão de ritmos cardíacos.



CONHECENDO O SIMULADOR SUSIE S901

Exame de mamas:

- O simulador possui uma mama direita e uma esquerda para praticar exercícios de exame de mama.
- A mama direita é saudável e a esquerda contém um tumor maligno.



EQUIPAMENTOS

Sala de Simulação 3

ASPIRADOR CIRÚRGICO



Acessórios:

- 2 Tubos Aspiradores Extenflex
- 1 Cabo de energia - 3 pinos
- 1 Pedal interruptor
- 1 Mangueira com frasco coletor

Fonte: Acervo Institucional

MANUAL DO ASPIRADOR CIRÚRGICO



Manual do Aspirador Cirúrgico -
Sala de Simulação 3

BISTURI ELETRÔNICO



Bisturi Eletrônico Modelo SS-501S WEM

Fonte: Acervo Institucional

BISTURI ELETRÔNICO



Manual do Bisturi Eletrônico Modelo SS-
501S WEM

MONITOR MULTIPARÂMETRO



Carro de Emergência Conkast
e Monitor Multiparâmentro Comen

Fonte: Acervo Institucional

ACESSÓRIOS – MONITOR MULTIPARÂMETRO

Contém:

- 1. 1 Transdutor de pressão transparente + cabo de IBP com velcro
- 2. 1 Conector de fonte de energia
- 3. 1 Condutor de equalização potencial
- 4. 1 Sensor de SpO2 – oxímetro



ACESSÓRIOS – MONITOR MULTIPARÂMETRO

Contém:

- 5. 1 Manga de pressão sanguínea + cabo NIBP
- 6. 1 Cabo com 5 eletrodos + velcro de fixação
- 7. 12 Adesivos para ECG
- 8. 1 Sensor de capnografia
- 9. 1 Sensor de temperatura



MONITOR MULTIPARÂMETRO COMEN



Monitor Multiparâmetros Comen

ESTAÇÃO DE TRABALHO DE ANESTESIA



Estação de Trabalho de Anestesia Dräger
Atlan 300XL

Fonte: Acervo Institucional

MANUAL DA ESTAÇÃO DE TRABALHO DE ANESTESIA

Instruções de uso da
Estação de trabalho de
anestesia



Lista de Acessórios da
Estação de trabalho de
anestesia



Documento Suplementar
da Estação de trabalho
de anestesia




MESA CIRÚRGICA MOTORIZADA / SIMULADOR SUSIE S901



Contém:

- 1 Tablet Samsung com o Aplicativo OMNI 2 (Acesso à simulador Susie S901)

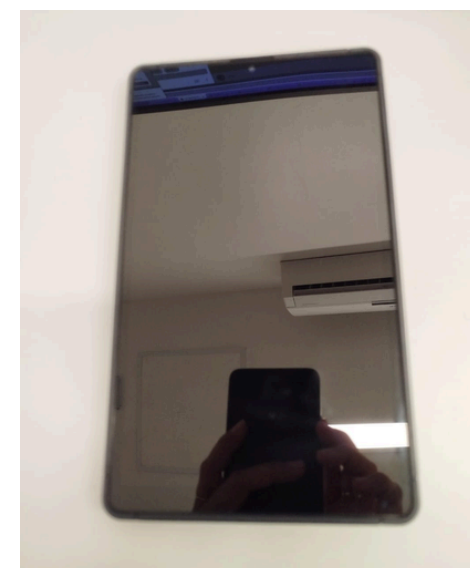

Fonte: Acervo Institucional

Todas as peças em inox da Mesa Cirúrgica Motorizada Barrbaf BF683 TD estão guardadas no Carro para Transporte (tombo:116940) na Sala de Simulação 3, com exceção dos acessórios: 2 suportes para membros inferiores e 1 Bandeja em inox, que estão na Mesa auxiliar da mesma sala.

MESA CIRÚRGICA MOTORIZADA



Manual da mesa cirúrgica
motorizada

MESA AUXILIAR



Contém:

- 1 Infusor para soluções parenterais – 2 vias Vital Gold
- 2 Sondas de aspiração traqueal – nº12 MedSonda
- 1 Tubo de traqueostomia com balão descartável Solidor
- 1 Sonda de Foley – 2 vias – 12FR Descarpack
- 1 Equipo para máquina de infusão 2,40m – laranja fotossensível Samtronic
- 1 Equipo para máquina de infusão 1,50m – branco transparente Biosani
- 1 Equipo para máquina de infusão 2,40m – branco transparente Samtronic

Fonte: Acervo Institucional

MESA AUXILIAR

Contém:

- 1 Equipo Macrogotas para infusão - Luer Slip Descarpack
- 1 Seringa com agulha e protetor de segurança - 3 ml Seringa SR
- 1 Sonda Endotraqueal com balão (oral/nasal) - balão: 28mm Well Lead
- 1 Sonda Endotraqueal com balão (oral/nasal) - balão: 20mm Well Lead
- 2 Tubos endotraqueais sem balão - 16FR Solidor
- 2 Guias de introdução para sonda endotraqueal - 14RF Well Lead
- 1 Dispositivo para infusão intravenosa 21GA - Referência: 38833714 BD Asepto
- 1 Cateter para subclávia biocat Biomedical
- 5 un de Dinitrato de isossorbida sublingual - lote: 2z1676 - Hospital da Mulher

MESA AUXILIAR

Contém:

- 1 Estetoscópio preto/inox Premium
- 1 Esparadrapo - 10cm x 4,5m Adpele
- 1 Sonda levine 120cm - 16RF Markmed
- 1 Cateter tipo óculos cod.: 10201201 MedSonda
- 1 Cateter para uso periférico - Laranja - 14G PolyMed
- 2 Cateteres para uso periférico - Preto - 16G PolyMed
- 1 Cateter para uso periférico - Verde - 18G PolyMed
- 1 Água para injeção - 250ml Farmace
- 1 Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% - 100ml Farmace

SALA DE REUNIÕES 1

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

SALA DE REUNIÕES 1

Armários com chave

Lixeiras plásticas com pedal

1 Mesa grande com tomadas

Lixeira inox com pedal

Lixeira plástica com pedal

8 cadeiras com rodízios

SALA DE REUNIÕES 2

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

SALA DE REUNIÕES 2

Armários com chave

1 Mesa grande com tomadas

Lixeira plástica com pedal

Lixeira inox com pedal


8 cadeiras com rodízios

BIBLIOTECA

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

BIBLIOTECA

3 Computadores

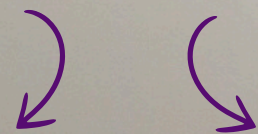

Armário deslizante



2 Armários grandes com chave



ACERVO DE OBRAS FÍSICAS DA BIBLIOTECA



Acesso ao acervo físico da Biblioteca do
Centro de Estudos

LABORATÓRIO DE MOLDES

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

LABORATÓRIO DE MOLDES

Aparelho Multimídia



Armário



6 mesas e 13 cadeiras



ITENS

Laboratório de Moldes

APARELHO MULTIMÍDIA

Contém:

- 1 Televisão preta touch screen LG Qualipix
- 1 Mouse preto sem fio Rappo
- 1 Controle remoto LG
- 1 Teclado preto sem fio Rappo



Fonte: Acervo Institucional

BANHUEIROS

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

BANHHEIRO SOCIAL FEMININO



Fonte: Acervo Institucional

BANHHEIRO SOCIAL MASCULINO



Fonte: Acervo Institucional

BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE



Os banheiros com acessibilidade são equipados com barras de apoio em aço, instaladas estrategicamente, para garantir maior segurança, estabilidade e autonomia às pessoas com deficiência (PCDs) durante o uso.

Fonte: Acervo Institucional

COPA

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

COPA

Microondas

Pia com acessórios

Geladeira

1 Mesa com 4 cadeiras

COPA



- É um espaço de apoio, destinado exclusivamente para **lanches curtos**, durante a rotina.
- Está equipada com geladeira, micro-ondas, mesa, cadeiras e uma pia, oferecendo praticidade para aquecer ou armazenar alimentos leves.
- **Para refeições completas, solicitamos que seja utilizado o refeitório do Hospital.**

Fonte: Acervo Institucional

GERÊNCIA

Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira

GERÊNCIA

Núcleo de Educação Permanente

Direção Acadêmica



GERÊNCIA

- É o espaço destinado ao esclarecimento de dúvidas relacionadas à Unidade Acadêmica, prestando apoio a estudantes, professores e profissionais.
- A Direção Acadêmica está sob a responsabilidade da **Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)**.

UERN

GERÊNCIA

No mesmo local, funciona o **NEP (Núcleo de Educação Permanente)**, que é um setor estratégico dentro do hospital, responsável por promover o desenvolvimento contínuo dos profissionais de saúde por meio da educação em serviço.

Conheça mais sobre o NEP e como ele pode te ajudar:

ESTÁGIO DE ESTUDANTES

Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008



GERÊNCIA

REALIZAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Portaria normativa nº 001/2018-GS/SESAP, de 08 de
janeiro de 2018



PROCESSOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E AÇÕES DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE
Portaria - SEI nº 1343, de 24 de julho de 2019

GERÊNCIA

CAMPO DE PRÁTICA PARA ATIVIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO

Portaria - SEI nº 1344, de 25 de julho de 2019



COMPETÊNCIAS DO NEP



Portaria - SEI nº 3072, de 29 de outubro de 2020



COMO CHEGAR À GERÊNCIA

Agora que você já sabe sobre a gerência, vamos aprender sua localização?

- Encontra-se no subsolo do Hospital, no mesmo corredor da Secretaria do Centro de Estudos.

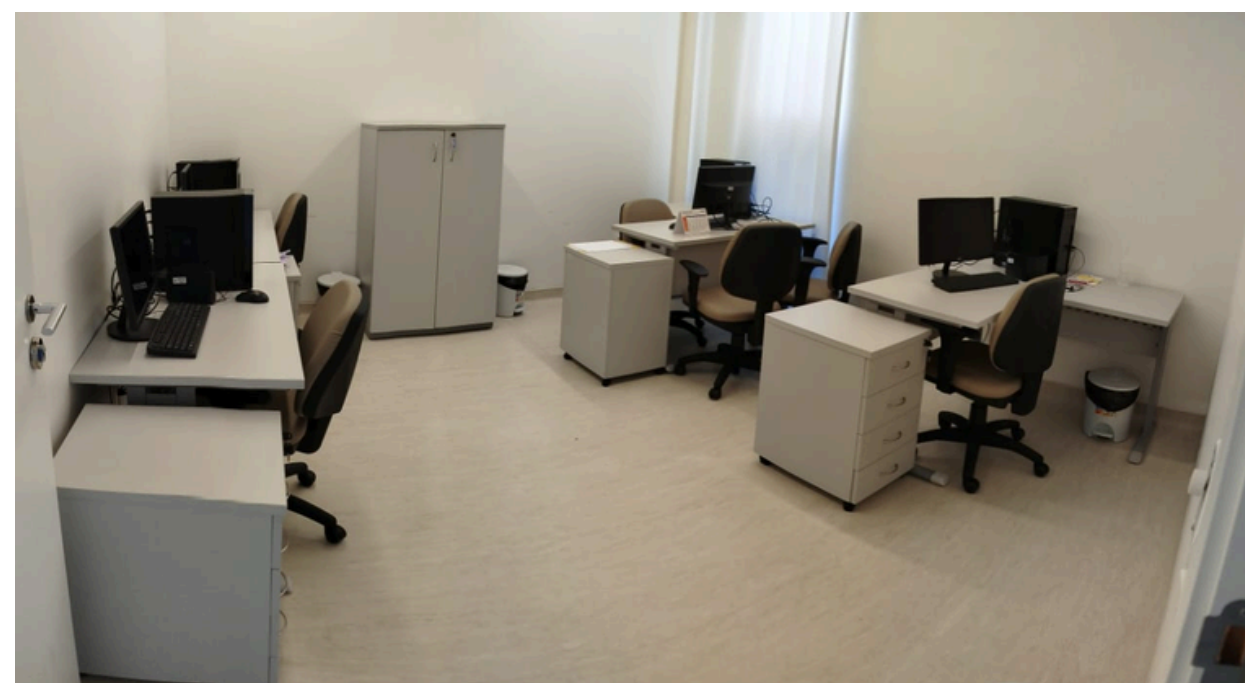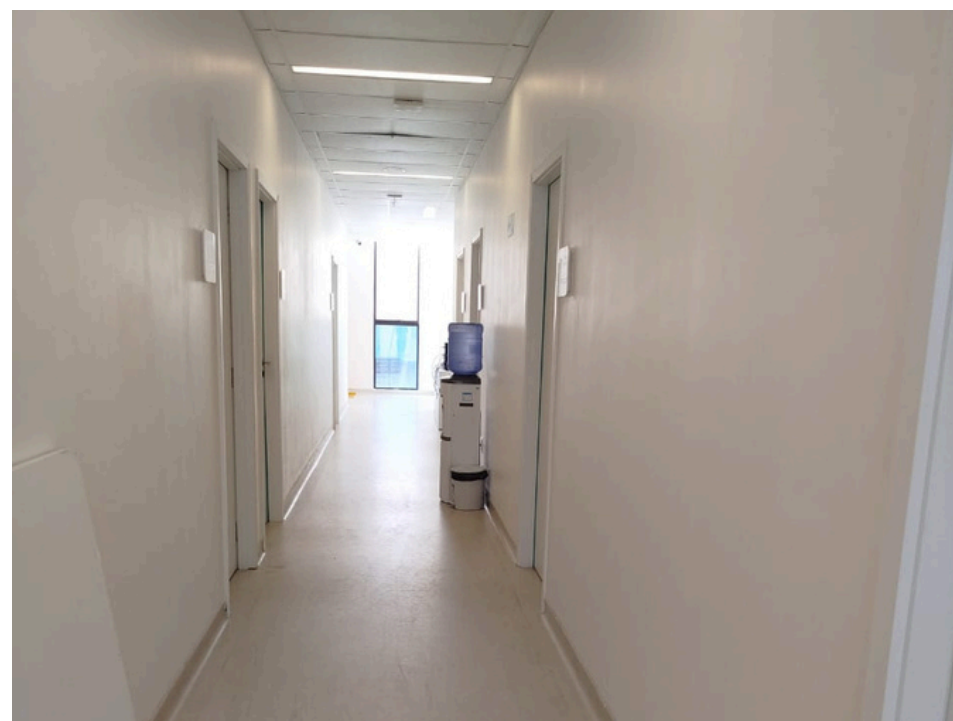

ENCERRAMENTO

- Depois de conhecer a estrutura da Unidade Acadêmica, os equipamentos disponíveis e as atividades que podem ser realizadas aqui, esperamos que sua experiência no Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia seja ainda mais proveitosa.



NECESSITA DE ALGUMA ATIVIDADE PRÁTICA OU AGENDAMENTO DE SALAS EM NOSSO CENTRO DE ESTUDOS?

ENTRE EM
CONTATO CONOSCO:



NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
nephospitaldamulher@gmail.com

